



Držák na hůl na chodítka – návod k montáži

Dvoudílný držák na hůl, který se připevňuje k rukojeti a rámu chodítka. Horní část má inteligentní funkci rychlého zámku, takže hůl lze rychle připevnit a odpojit. Pasuje na rolátory Walker 9, 12 a 14 let.

Naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu nebo zařízení a zobrazte si video s pokyny.



- ① Otočte horní držák tak, aby logo směřovalo nahoru.



- ② Nasadte držák na horní část trubky rukojeti.

Nasadte držák na horní část trubky rukojeti a poté jej přišroubujte křížovým šroubovákem.




- ③ Pokud připevníte držák hůlky i opěradla

Poznámka: Upravte polohu brzdové páky tak, aby vedle opěradla byl prostor pro horní držák hůlky. Pro umístění držáku hůlky a opěradla na chodítka může být nutné držák hůlky naklonit směrem ven, přibližně o 30 stupňů.




④ Připevněte spodní držák k rámu

Pro montáž na pravou/levou stranu otočte spodní držák tak, abyste dosáhli na šroub z vnější strany rámu. Chcete-li připevnit spodní držák k rámu, omotejte popruh kolem trubky rámu a zatlačte jej do otvoru v držáku.

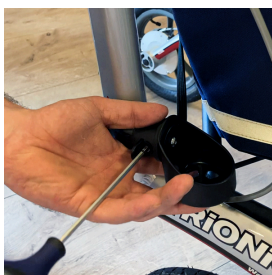

⑤ Utáhněte šroub/pásek

Utáhněte šroub/pásku pomocí 4mm imbusového klíče.

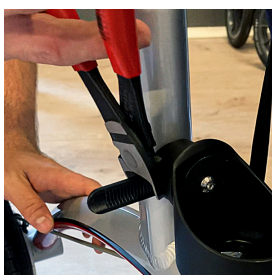

⑥ Odstříhňte přebytečnou délku popruhu

Přebytečnou délku popruhu odstříhňte štípačkami na kabely.



⑦ Připraveno k použití