



Opěradlo pro chodítka Trionic – návod k montáži



Ergonomické a polstrované opěradlo, vyrobené z vodoodpudivého a odolného polyesteru 600D, je vhodné pro kočárky Walker 9, 12 a 14 let. Nabízí pohodlnou a bezpečnou oporu při sezení.

Délka/hloubka opěradla je nastavitelná.

① Odšroubovat.

Odstraňte šrouby a matice ze dvou svorek.

② Připevněte opěradlo.

Trochu otevřete svorky a připevněte je k úchytům.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že logo „TRiONiC“ je správně umístěno, protože opěradlo je nakloněno.



③ Celou cestu nahoru.

Zatlačte obě svorky úplně nahoru. Možná budete muset povolit šroub na brzdové páce, abyste ji mohli trochu posunout dozadu.





④ upevněte opěradlo.

Pomocí 4mm imbusového klíče upevněte obě svorky šrouby a maticemi. Popruhy opěradla by měly v místě upevnění směřovat dopředu.

⑤ Tato fotografie ukazuje správnou montáž.



Před rozložením rolátoru.

Chcete-li rozložit pojízdný roletový systém, nakloňte opěradlo nahoru.

V případě potřeby.

Pokud se vám opěradlo zdá příliš krátké/příliš dlouhé, můžete jeho délku upravit. Odstraňte dva šrouby a matice a poté opěradlo znovu sestavte.

