



## Manuál: Výměna popruhu opěrky zad Trionic Walker




① Odšroubujte šroub, který drží popruh, pomocí 3mm imbusového klíče.

Opakujte na opačné straně.



② Ujistěte se, že máte zpět šroub, matici a trubkovou distanční podložku.

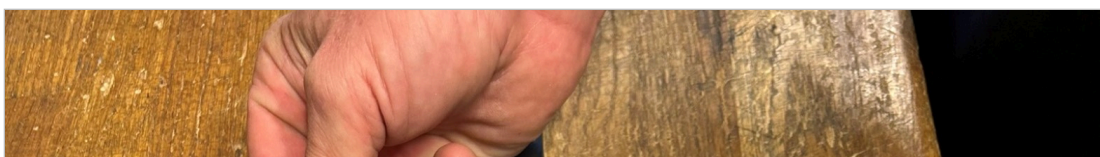



## Manuál: Výměna popruhu opěrky zad Trionic Walker



- ⑤ Vložte nový náhradní popruh do polstrování.

**DŮLEŽITÉ:** Ujistěte se, že konec popruhu je zarovnan s logem TRIONIC, jak je znázorněno na fotografii.



- ⑥ Vložte trubkovou distanční vložku do otvoru na konci popruhu.

