



## **Přepavní taška Walker – Pokyny k balení**


Přepavní taška Walker se skládá z hlavní přepavní tašky a menší úložné/přenosné tašky. Přepavní taška je vhodná pro všechny modely Walker.

Pasuje na všechny modely Trionic Walker.




### ① Otevřete hlavní sáček

Rozepněte úložný vak a vybalte hlavní přepavní vak.

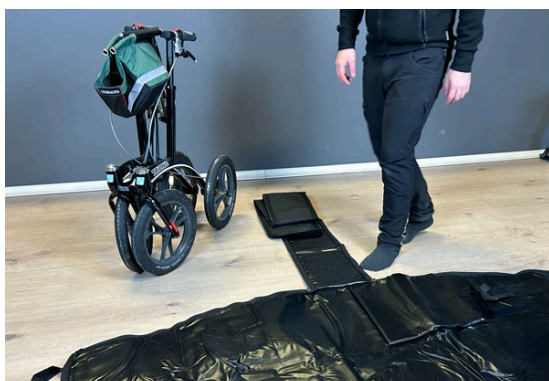


### ② Rozložte hlavní tašku.

Rozepněte zip hlavní tašky po celé délce a rozložte klopky tašky na podlahu.

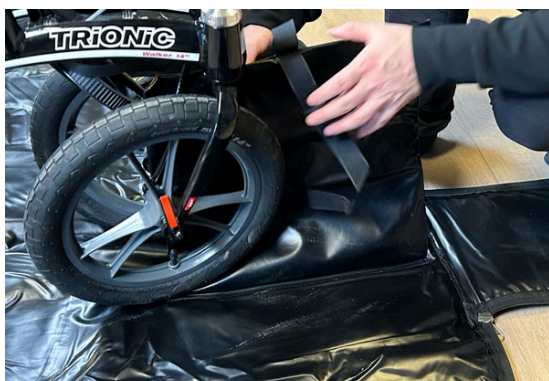

### ③ Umístěte chodítko na tašku.


Umístěte chodítko do střední části hlavní přepavní tašky. Hlavní taška má integrovanou polstrovanou ochrannou klopku se suchým zipem. Vytáhněte polstrovanou ochrannou klopku nahoru a vložte ji mezi vidlice předních kol, abyste ochránili lak.

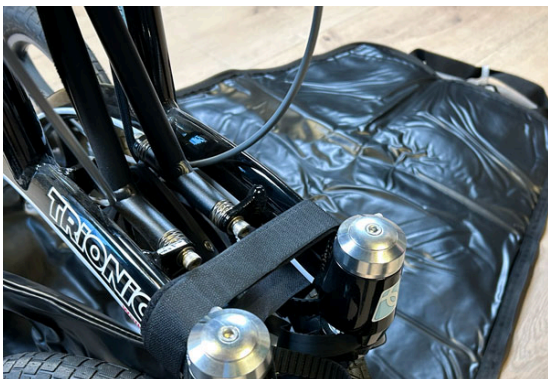

④ Složený rám zajistěte integrovaným suchým zipem.



⑤ Přehněte středovou klopou přes chodítko.

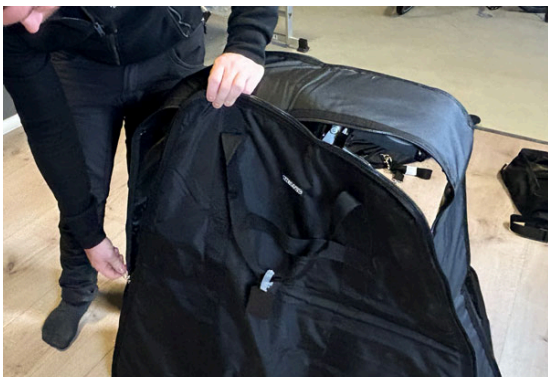

⑥ Zvedněte boční klopky a zapněte hlavní zip.



⑦ Tato fotografie ukazuje Walker správně zabalený.

## **Pokyny pro balení**



*Naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu nebo zařízení a zobrazte si video s pokyny.*