



Přepavní taška Walker – Pokyny k balení


Přepavní taška Walker se skládá z hlavní přepavní tašky a menší úložné/přenosné tašky. Přepavní taška je vhodná pro všechny modely Walker.

Pasuje na všechny modely Trionic Walker.




① Otevřete hlavní sáček

Rozeptejte úložný vak a vybalte hlavní přepavní vak.

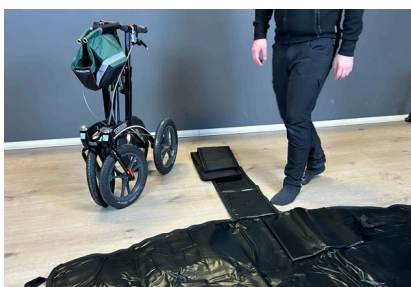


② Rozložte hlavní tašku.

Rozeptejte zip hlavní tašky po celé délce a rozložte klopky tašky na podlahu.

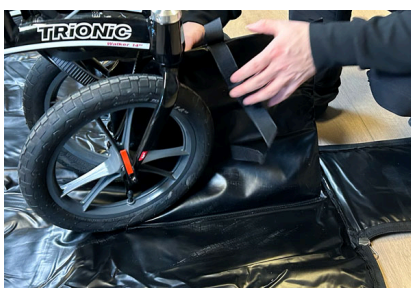

③ Umístěte chodítko na tašku.

Umístěte chodítko do střední části hlavní přepavní tašky. Hlavní taška má integrovanou polstrovanou ochrannou klopku se suchým zipem. Vytáhněte polstrovanou ochrannou klopku nahoru a vložte ji mezi vidlice předních kol, abyste ochránili lak.

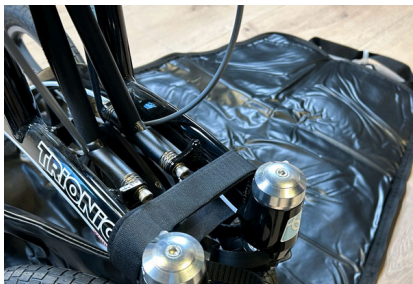

④ Složený rám zajistěte integrovaným suchým zipem.



⑤ Přehněte středovou klopou přes chodítko.

⑥ Zvedněte boční klopou a zapněte hlavní zip.

⑦ Tato fotografie ukazuje Walker správně zabalený.

Pokyny pro balení

Naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu nebo zařízení a zobrazte si video s pokyny.