



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το μπροστινό φως LED Trionic 1600 Lumen με μπαταρία.

Αυτό το εγχειρίδιο δείχνει πώς να τοποθετήσετε τη βάση του φωτιστικού και το φωτιστικό σε ένα Walker (αριστερή στήλη παρακάτω) και επίσης πώς να τα τοποθετήσετε σε ένα Veloped (δεξιά στήλη παρακάτω).

Στην αριστερή φωτογραφία, το **A** δείχνει τα εξαρτήματα στερέωσης της βάσης για ένα Walker (2 βίδες + 2 ροδέλες). Το **B** δείχνει τα εξαρτήματα στερέωσης της βάσης για ένα Veloped (1 βίδα + 1 οδοντωτό παξιμάδι + 1 παξιμάδι).



Σύνδεση της βάσης φωτισμού

Οδηγίες για έναν περιπατητή



A1. Στην κορυφή του μαύρου ημι-κάθετου σωλήνα, εντοπίστε τις δύο βίδες που σφίγγουν τον σωλήνα λαβής, ο οποίος βρίσκεται μπροστά από τη μανέτα φρένου.


A2. Χαλαρώστε και τις δύο βίδες με το κλειδί Allen 5 mm που περιλαμβάνεται στη λυχνία LED.

A3. Αφαιρέστε τις δύο βίδες από τον σφιγκτήρα λαβής.

A4. Τοποθετήστε τη βάση στήριξης του φωτιστικού πάνω από τον σφιγκτήρα λαβής, με το κυκλικό και σχισμένο εξάρτημα φωτιστικού να δείχνει προς τα εμπρός και προς τα πάνω. Εισάγετε τις δύο βίδες με ροδέλες στις σπές του σφιγκτήρα.

A5. Σφίξτε τις δύο βίδες με το κλειδί Allen 5 mm. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Είναι σημαντικό να σφίξετε σωστά τις βίδες, καθώς ασφαλίζουν τον σωλήνα λαβής με την λαστιχένια λαβή και τον μοχλό φρένου.

Οδηγίες για ένα Veloped

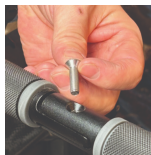

B1. Εντοπίστε τη βίδα στον κεντρικό πτυσσόμενο μεντεσέ της ράβδου λαβής σχήματος U του Veloped. Σεβιδώστε τη βίδα με το παρεχόμενο κλειδί Allen 4 mm και αφαιρέστε την.

B2. Αντικαταστήστε την παλιά βίδα με τη μακρότερη βίδα που περιλαμβάνεται στη λυχνία LED. Συνδέστε τη μακρότερη βίδα στον μεντεσέ και σφίξτε την με το κλειδί Allen 4 mm.

B3. Συνδέστε το κοντό γωνιακό άκρο της βάσης φωτισμού στο κάτω άκρο της βίδας, στο κάτω μέρος της ράβδου λαβής σε σχήμα U. Η βάση πρέπει να δείχνει προς τα κάτω. Στερεώστε τη βάση με μία ροδέλα και το ρικνωτό παξιμάδι που σφίγγετε με τα δάχτυλά σας.

B4. Για πιο ασφαλή στερέωση της βάσης, σπασφεύγοντας την ακούσια πλάγια περιστροφή της, αντικαταστήστε το ρικνωτό παξιμάδι με το παρεχόμενο παξιμάδι από ανοξείδωτο χάλυβα και σφίξτε το με ένα κλειδί 10 mm.

B5. Αυτή η φωτογραφία δείχνει τη βάση του φωτιστικού όπως έχει τοποθετηθεί σωστά.

Σύνδεση του φωτιστικού **LED** στη βάση

Οδηγίες για έναν **περιπατητή**

A6. Προσδιορίστε το κυκλικό μπροστινό άκρο της βάσης του φωτιστικού, με δύο υποδοχές για την τοποθέτηση του φωτιστικού.

A7. Πιέστε το υποστήριγμα με τις εγκοπές του φωτιστικού στις υποδοχές της βάσης και βεβαιωθείτε ότι είναι ευθυγραμμισμένες. Βλέποντας προς την κατευθυνση κίνησης του Walker, εισάγετε το παρεχόμενο παξιμάδι-πιεταλούδα από τα αριστερά και σφίξτε το.

Οδηγίες για ένα **Veloped**

B6. Εντοπίστε τη βίδα στον κεντρικό πτυσσόμενο μεντεσέ της ράβδου λαβής σχήματος U του Veloped. Ξεβιδώστε τη βίδα με το παρεχόμενο κλειδί Allen 4 mm και αφαιρέστε την.

B7. Προσδιορίστε το κυκλικό μπροστινό άκρο της βάσης του φωτιστικού, με δύο υποδοχές για την τοποθέτηση του φωτιστικού.

Τοποθέτηση της **μπαταρίας**

Οδηγίες για έναν **περιπατητή**

A8. Περάστε το μακρύτερο καλώδιο προέκτασης κατά μήκος του ημι-κάθετου σωλήνα λαβής του Walker και ασφαλίστε το με τον παρεχόμενο ιμάντα velcro.

A9. Μπορείτε να κόψετε το υπερβολικό μήκος του ιμάντα velcro με ένα ψαλίδι.

A10. Τοποθετήστε την μπαταρία στην πίσω τσέπη με φερμουάρ του καλαθιού.

Οδηγίες για ένα **Veloped**

B8. Περάστε το μακρύτερο καλώδιο προέκτασης κατά μήκος της ράβδου λαβής σχήματος U του Veloped και ασφαλίστε το με τον παρεχόμενο ιμάντα velcro.

B9. Μπορείτε να κόψετε το υπερβολικό μήκος του ιμάντα velcro με ένα ψαλίδι.

B10. Τοποθετήστε την μπαταρία στην πίσω τσέπη με φερμουάρ του καλαθιού.

Η συσκευασία **περιέχει**

Πώς να χειρίζεστε το φως