

Βάση μπουκαλιών Veloped – Οδηγίες συναρμολόγησης


Βάση μπουκαλιών με veloped και rollator, γενικής χρήσης, που στερεώνεται στο πλαίσιο με veloped με βιδωτό σφιγκτήρα. Χρώμα: μαύρο.

Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση μπουκαλιών, βάση σφιγκτήρα και κλειδί allen 3 mm.


Σαρώστε τον κωδικό QR με το smartphone ή την κινητή σας συσκευή για να δείτε τις οδηγίες σε βίντεο.



① Ξεβιδώστε και αφαιρέστε μία βίδα από τη βάση σφιγκτήρα.

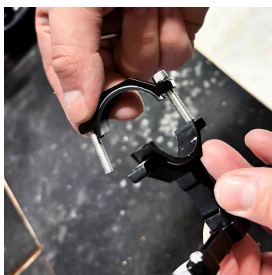

② Ξεβιδώστε την άλλη βίδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά αφήστε την προσαρτημένη στον σφιγκτήρα.

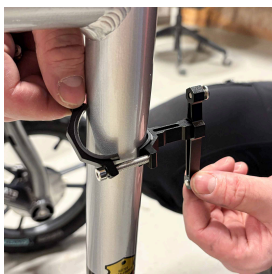

③ Περιστρέψτε το μισό του σφιγκτήρα κατά 90 μοίρες για να διευκολύνετε την τοποθέτηση του σφιγκτήρα στο πλαίσιο Veloped. Με τον κοντό βραχίονα της θήκης μπουκαλιών προς τα πάνω, στερεώστε τον σφιγκτήρα στο κατακόρυφο μέρος του δεξιού ή αριστερού πίσω σωλήνα πλαισίου του Veloped. Όταν βιδώνετε τον σφιγκτήρα στο πλαίσιο του Veloped, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βίδες είναι σφιγμένες εξίσου.



- ④ Χαλαρώστε τις δύο βίδες στο βραχίονα σφιγκτήρα και στη συνέχεια βιδώστε τη θήκη μπουκαλιών πάνω σε αυτήν, κατά προτίμηση με το πλευρικό άνοιγμα της θήκης μπουκαλιών στραμμένο προς τα έξω.



- ⑤ Η θήκη μπουκαλιών με βελονάκι είναι τώρα σωστά τοποθετημένη και έτοιμη για χρήση. Μπράβο.