




Βάση μπαστουιού για περιπατητές – οδηγίες συναρμολόγησης

Θήκη για μπαστούνι 2 τεμαχίων που προσαρτάται στη λαβή και στο πλαίσιο του Walker. Το πάνω μέρος διαθέτει έξυπνη λειτουργία γρήγορου κλειδώματος και το μπαστούνι μπορεί να προσαρτηθεί και να αφαιρεθεί γρήγορα. Ταιριάζει στα rollators Walker 9er, 12er και 14er.

Σαρώστε τον κωδικό QR με το smartphone ή την κινητή σας συσκευή για να δείτε τις οδηγίες σε βίντεο.

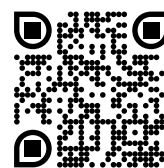

- ① Γυρίστε την επάνω βάση έτσι ώστε το λογότυπο να είναι στραμμένο προς τα πάνω.



- ② Κουμπώστε τη βάση στο πάνω μέρος του σωλήνα χειρολαβής.

Ασφαλίστε τη βάση στο πάνω μέρος του σωλήνα χειρολαβής και στη συνέχεια βιδώστε την στη θέση της με ένα κατσαβίδι Phillips.



- ③ Εάν συνδέσετε τόσο τη βάση στήριξης μπαστουιού όσο και την πλάτη

Σημείωση: Ρυθμίστε τη θέση του μοχλού φρένου έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για την άνω βάση στήριξης μπαστουιού δίπλα στην πλάτη. Μπορεί να χρειαστεί να γείρετε τη βάση στήριξης μπαστουιού προς τα έξω, περίπου 30 μοίρες, για να χωρέσει η βάση στήριξης μπαστουιού και η πλάτη του Walker.




④ Συνδέστε την κάτω βάση στο πλαίσιο

Για συναρμολόγηση δεξιά/αριστερή πλευρά, περιστρέψτε την κάτω βάση έτσι ώστε να μπορείτε να φτάσετε τη βίδα από το εξωτερικό του πλαισίου. Για να στερεώσετε την κάτω βάση στο πλαίσιο, τυλίξτε τον ιμάντα γύρω από τον σωλήνα του πλαισίου και πιέστε τον στην οπή της βάσης.



⑤ Σφίξτε τη βίδα/ιμάντα

Σφίξτε τη βίδα/ιμάντα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Allen 4 mm.

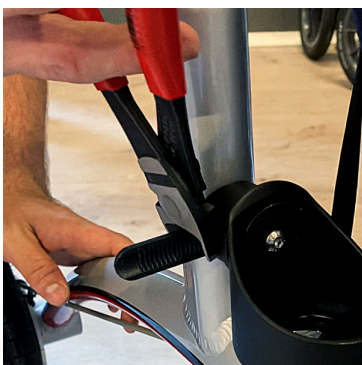

⑥ Κόψτε το υπερβολικό μήκος του λουριού

Κόψτε το επιπλέον μήκος του ιμάντα με κόφτη καλωδίων.



⑦ Έτοιμο για χρήση