



Εγχειρίδιο: Συναρμολόγηση θήκης μπουκαλιών σε **Walker 12er** μέγεθος **S**




① Θέση συναρμολόγησης της θήκης φιάλης (δεξιά ή αριστερά).



② Τυλίξτε τον ιμάντα γύρω από τον σωλήνα του πλαισίου και τραβήξτε τον μέσα από τη θήκη.



③ Τραβήξτε σφιχτά τον ιμάντα και περιστρέψτε το παξιμάδι δεξιόστροφα για να τον σφίξετε.

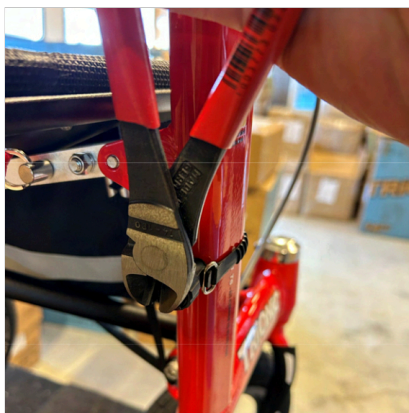

④ Κόψτε το υπερβολικό λουράκι.



⑤ Τοποθετήστε τη δεύτερη βάση με τον ίδιο τρόπο.



⑥ Οι δύο βάσεις έχουν συναρμολογηθεί σωστά στον σωλήνα του πλαισίου.



⑦ Στερεώστε τη θήκη μπουκαλιών με τις δύο βίδες. Το «άνοιγμα» της θήκης μπουκαλιών πρέπει να είναι στραμμένο προς τα έξω.



⑧ Η θήκη για το μπουκάλι είναι τώρα προσαρτημένη στο πλαίσιο και εισάγετε το μπουκάλι από το πλάι και το αφαιρείτε προς τα έξω.