



## Πλάτη **Trionic Walker** – Οδηγίες συναρμολόγησης



Η εργονομική και επενδεδυμένη πλάτη, κατασκευασμένη από υδροαπωθητικό και ανθεκτικό πολυεστέρα 600D, ταιριάζει στα rollators Walker 9er, 12er και 14er. Προσφέρει άνετη και ασφαλή στήριξη όταν κάθεστε.

Το μήκος/βάθος της πλάτης είναι ρυθμιζόμενο.

### ① Ξεβιδώνω.

Αφαιρέστε τις βίδες και τα παξιμάδια από τους δύο σφιγκτήρες.

### ② Συνδέστε την πλάτη του καθίσματος.

Ανοιξτε λίγο τους σφιγκτήρες και στερεώστε τους στους σωλήνες λαβής.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Βεβαιωθείτε ότι το λογότυπο "TRIONIC" έχει τοποθετηθεί σωστά, καθώς η πλάτη του καθίσματος είναι υπό γωνία.



### ③ Όλο το δρόμο προς τα πάνω.

Πιέστε τους δύο σφιγκτήρες μέχρι πάνω. Μπορεί να χρειαστεί να χαλαρώσετε τη βίδα στη μανέτα φρένου για να την μετακινήσετε λίγο προς τα πίσω.





**④ στερεώστε την πλάτη του καθίσματος.**

Με ένα κλειδί Allen 4 mm, στερεώστε και τους δύο σφιγκτήρες με τις βίδες και τα παξιμάδια. Οι ιμάντες της πλάτης πρέπει να δείχνουν προς τα εμπρός στο σημείο σύνδεσης.

**⑤ Αυτή η φωτογραφία δείχνει τη σωστή συναρμολόγηση.**



**Πριν ξεδιπλώσετε τον κύλινδρο.**

Για να ξεδιπλώσετε τον τροχό, γυρίστε την πλάτη του καθίσματος προς τα πάνω.

**Εάν είναι απαραίτητο.**

Αν διαπιστώσετε ότι η πλάτη του καθίσματος είναι πολύ κοντή/πολύ μακριά, μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος. Αφαιρέστε τις δύο βίδες και τα παξιμάδια και στη συνέχεια συναρμολογήστε ξανά την πλάτη του καθίσματος.

