



Εγχειρίδιο: Αντικατάσταση του ιμάντα πλάτης **Trionic Walker**




- ① Ξεβιδώστε τη βίδα που συγκρατεί το λουράκι με ένα κλειδί Allen 3 mm.

Επαναλάβετε στην αντίθετη πλευρά.



- ② Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανακτήσει τη βίδα, το παξιμάδι και τον σωληνωτό αποστάτη.

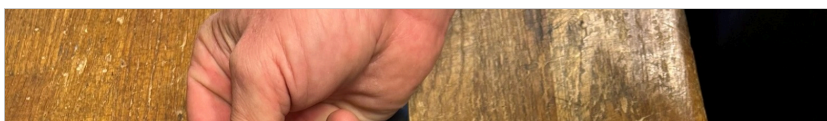



Εγχειρίδιο: Αντικατάσταση του ιμάντα πλάτης **Trionic Walker**



- ⑤ Τοποθετήστε τον νέο ανταλλακτικό ιμάντα στην επένδυση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει το άκρο του λουριού με το λογότυπο TRIONIC όπως φαίνεται στη φωτογραφία.



- ⑥ Τοποθετήστε το σωληνωτό διαχωριστικό στην οπή στο άκρο του ιμάντα.

