



## Ajuste de longitud del eje QR delantero

¡Asegúrese de que esté correctamente ajustado por razones de seguridad!



1. Afloje los 2 tornillos de la llave Allen y empuje el eje QR hacia abajo a través de la horquilla hasta que la tuerca grande del eje sea visible.



2. Regule la longitud del eje QR con las llaves inglesas de 11 mm y 19 mm. Evite que el eje QR gire manteniéndolo en su extremo con la llave de 11 mm. Ajuste la tuerca con la llave de 19 mm. Si el eje no cierra o fija la montura, con solo atornillar la tuerca  $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$  y girar hacia la izquierda es suficiente.
3. Vuelva a apretar los 2 tornillos de la horquilla para fijar el eje QR a esta e intente unir la suspensión delantera a la montura. Confirme que esté completamente fijado en su lugar.

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente: (+46) 852 210 050