




## Indicaciones para instalar el portabastón del Veloped

Portabastón de 2 piezas para el andador Veloped que también funciona como una correa de seguridad cuando el Veloped se pliega para su transporte o su almacenamiento. El soporte de bastón se adapta a todos los modelos de Veloped.

Escanee el código QR con su teléfono inteligente o dispositivo para ver las indicaciones en el vídeo.

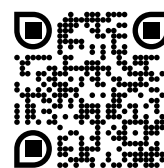

### ① Coloque la base trasera.

Ciña el soporte trasero alrededor de la parte superior del tubo vertical del armazón trasero, justo debajo del mecanismo de liberación rápida para el ajuste de la altura.



### ② Apriete la correa.

Tire firmemente de la correa hasta tensarla, pásela alrededor del tubo y asegúrela con el cierre de Velcro. Permita que el fragmento restante de correa cuelgue libremente



### ③ Ajuste el bucle trasero.

Puede ajustar el tamaño del lazo trasero aflojando el cierre de Velcro. Quizá necesite presionar suavemente el lazo para conseguir una forma redonda o circular.



**4** Coloque la base frontal.

Ciña el soporte delantero alrededor de la parte superior del tubo del armazón, justo detrás del enganche de la guía de la cesta. Asegúrese de colocar el fragmento antideslizante contra el tubo del armazón.



**5** Ajuste el bucle frontal.

Puede ajustar el tamaño del lazo delantero aflojando el cierre de Velcro. Quizá necesite presionar suavemente el lazo para conseguir una forma redonda o circular.



**6** Coloque el bastón.

Coloque el bastón para caminar empujándolo desde la parte trasera, primero a través del soporte trasero y luego del delantero.



**7** Asegure la estructura.

Puede utilizar la correa del portabastón para asegurar el armazón al plegarlo, para transportar o almacenar su Veloped.