

## Portabotellas Veloped – Instrucciones de montaje


Portabotellas universal para Veloped y andador, que se fija al cuadro del Veloped con una abrazadera. Color: negro.

La entrega incluye un portabotellas, una abrazadera y una llave Allen de 3 mm.


Escanee el código QR con su teléfono inteligente o dispositivo para ver las indicaciones en el vídeo.



① Desatornille y retire un tornillo del soporte de la abrazadera.

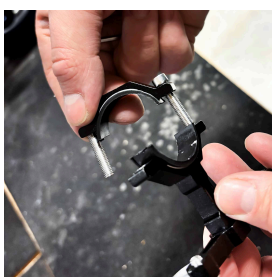

② Desatornille el otro tornillo lo máximo posible, pero déjelo fijado a la abrazadera.

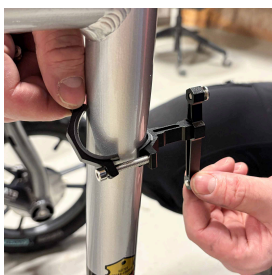

③ Gire la mitad de la abrazadera 90 grados para facilitar su montaje en el cuadro Veloped. Con el brazo corto del portabotellas hacia arriba, fije la abrazadera a la parte vertical del tubo trasero derecho o izquierdo del cuadro del Veloped. Al atornillar la abrazadera al cuadro del Veloped, asegúrese de que ambos tornillos estén apretados por igual.



- ④ Afloje los dos tornillos del soporte de la abrazadera y luego atornille el soporte de la botella, preferiblemente con la abertura lateral del soporte de la botella hacia afuera.



- ⑤ El portabotellas Veloped ya está correctamente montado y listo para usar. ¡Bien hecho!