



## Manual: Montaje del portabotellas en Walker 12er tamaño S




① Lugar de ensamblaje del portabotellas (R o L).



② Envuelva la correa alrededor del tubo del marco y tire de ella a través del soporte.



③ Tire de la correa para que quede ajustada y gire la tuerca a la derecha para apretar la correa.

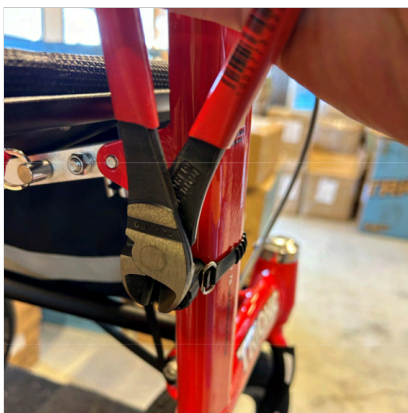

④ Reduzca el exceso de la correa.



⑤ Arme la segunda base de la misma manera.



⑥ Las dos bases armadas o montadas de manera correcta en el tubo del armazón.



⑦ Coloque el portabotella con los dos tornillos. El "orificio" del portabotella debe estar hacia afuera.



⑧ El portabotella está ahora fijo al armazón e ingrese la botella por un lado y se retira hacia fuera.