



Indicaciones para instalar el respaldo del Walker de Trionic



Este respaldo está hecho de resistente poliéster 600D, es ergonómico y se ajusta a todos los andadores Walker 9er, 12er y 14er. Le brinda seguridad al sentarse y comodidad por ser acolchado.

La longitud y la profundidad del respaldo son ajustables. El respaldo está disponible en tres longitudes diferentes: P, M y G.

① Destornillar.

Retire los pernos y tuercas de las dos pinzas.

② Coloque el respaldo.

Abra un poco las pinzas y colóquelas en los tubos del manillar. **IMPORTANTE** Asegúrese de posicionar correctamente el logotipo de TRIONIC, ya que el respaldo tiene una inclinación.



③ Todo el camino hacia arriba.

Desplace las dos pinzas hasta la parte superior. Es posible que deba aflojar el perno en la palanca de freno para moverla un poco hacia atrás.





④ **fijar el respaldo.**

Con ayuda de una llave Allen de 4 mm, apriete los pernos y tuercas de ambas pinzas. En el punto en que sienta firmeza, las correas del respaldo deben apuntar hacia adelante.

⑤ **Esta foto muestra el montaje correcto.**



Antes de desplegar el andador.

Para desplegar el andador, incline el respaldo hacia arriba.

Si es necesario.

Si considera que el respaldo es demasiado corto o largo, puede ajustar la longitud. Retire los dos pernos y tuercas y vuelva a ensamblar en respaldo.