



## **Manual: Reemplazo de la correa del respaldo del andador Trionic**




① Desatornille el tornillo que sujeta la correa con una llave Allen de 3 mm.

Repita en el lado opuesto.



② Asegúrese de recuperar el tornillo, la tuerca y el espaciador tubular.

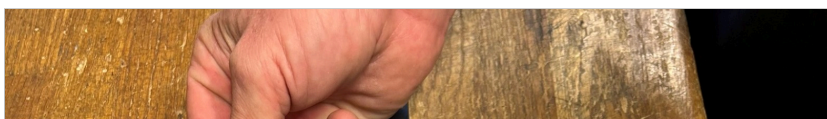



## **Manual: Reemplazo de la correa del respaldo del andador Trionic**



- ⑤ Inserte la nueva correa de repuesto en el acolchado.

**IMPORTANTE:** Asegúrese de alinear el extremo de la correa con el logotipo de TRIONIC como se muestra en la foto.



- ⑥ Inserte el espaciador tubular en el orificio situado en el extremo de la correa.

