

Veloped pudelihoidja – kokkupanekujuhised


Veloped pudelihoidja, mis kinnitatakse Veloped raami külge kruviklambriga. Värvus: must.

Komplektis on pudelihoidja, klambrikinnitus ja 3 mm kuuskantvõti.

Videojuhiste vaatamiseks skannige QR-koodi oma nutitelefoni või muu seadmega.



① Keerake lahti ja eemaldage klambri kinnitusest üks kruvi.

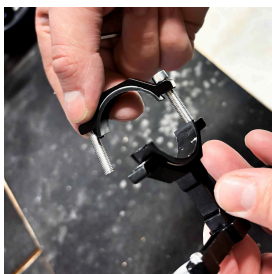

② Keerake teine kruvi nii palju lahti kui võimalik, aga jätke see klambri külge.



③ Klambri Veloped raamile paigaldamise hõlbustamiseks pöörake ühte poolt klambrist 90 kraadi. Pudelihoidja lühike haru ülespoole suunatuna kinnitage klamber Velopedi parema või vasaku tagumise raamitoru vertikaalse osa külge. Klambri Velopedi raamile kruvimisel veenduge, et mõlemad kruvid oleksid võrdselt pingutatud.



- ④ Keerake lahti klambri kronsteini kaks kruvi ja seejärel kruvige pudelihooidja selle külge, eelistatavalt nii, et pudelihooidja külgmiline ava oleks suunatud väljapoole.



- ⑤ Veloped pudelihooidja on nüüd õigesti paigaldatud ja kasutusvalmis.