



## Käimiskepi hoidik – kokkupanekujuhised

Kaheosaline kepihoidik, mis kinnitatakse Walkeri käepideme ja raami külge. Ülemisel osal on nutikas kiirlukustusfunktsioon ning keppi saab kiiresti kinnitada ja eemaldada. Sobib Walker 9er, 12er ja 14er rullikutele.

Videojuhiste vaatamiseks skannige QR-koodi oma nutitelefoni või muu seadmega.



- ① Pöörake ülemist hoidikut nii, et logo oleks suunatud ülespoole.



- ② Kinnitage hoidik käepideme toru ülemise osa külge klõpsatusega.

Kinnitage hoidik käepideme toru ülemise osa külge ja keerake see seejärel Phillipsi kruvikeerajaga kinni.



- ③ Kui kinnitate nii kepihoidiku kui ka seljatoe

**Märkus:** Reguleerige pidurikangi asendit nii, et seljatoe kõrval oleks ruumi ülemisele kepihoidjale. Kepihoidja ja seljatoe Walkerile paigaldamiseks võib olla vajalik kepihoidjat umbes 30 kraadi väljapoole kallutada.




#### ④ Kinnitage alumine hoidik raami külge

Parem-/vasakpoolseks paigaldamiseks keerake alumist hoidikut nii, et pääseksite kruvini raami välisküljelt ligi. Alumise hoidiku raami külge kinnitamiseks mähkige rihm raamitoru ümber ja lükake see hoidiku auku.



#### ⑤ Pingutage kruvi/rihma

Pingutage kruvi/rihma 4 mm kuuskantvõtmeaga.

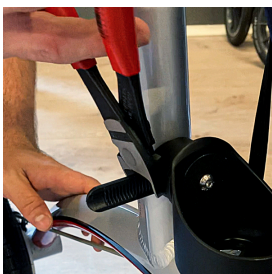

#### ⑥ Lõika rihma liigne pikkus ära

Lõika rihma üleliigne pikkus kaablilõikuriga ära.



#### ⑦ Kasutusvalmis