



Kasutusjuhend: Pudelihoidja kokkupanek Walker 12er suurusele S




① Pudelihoidja paigalduskoht (P või L).



② Mähi rihtm ümber raami toru ja tõmba see läbi hoidiku.



③ Tõrmmake rihtm tihedalt kinni ja keerake mutrit päripäeva, et rihma pingutada.

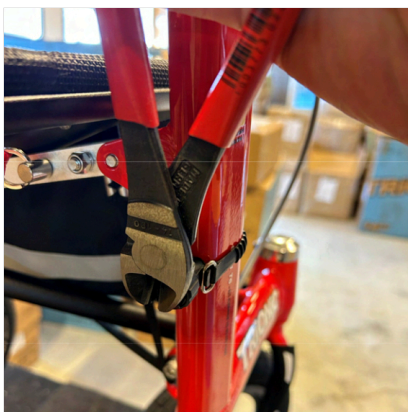

④ Lõika üleliigne rihtm ära.



⑤ Paigalda teine hoidik samamoodi.



⑥ Kaks hoidikut on raamitorule õigesti paigaldatud.



⑦ Kinnitage pudelihoidja kahe kruviga. Pudelihoidja "ava" peaks olema suunatud väljapoole.



⑧ Pudelihoidja on nüüd raami külge kinnitatud ja pudel sisestatakse küljelt ning eemaldatakse väljapoole.