



## **Trionic Walker seljatoe kokkupanekujuhend**

Ergonoomiline ja polsterdatud seljatugi, mis on valmistatud vetthülgavast ja vastupidavast 600D polüestrist, sobib Walker 9er, 12er ja 14er rullikutele. See pakub istudes mugavat ja turvalist tuge.

Seljatoe pikkus/sügavus on reguleeritav.

### **① Keerake lahti.**

Eemaldage kruvid ja mutrid kahelt klambrilt.

---

### **② Kinnitage seljatugi.**

Avage klambreid veidi ja kinnitage need käepidemete torude külge. **TÄHTIS:** Veenduge, et „TRIONIC” logo oleks õigesti paigutatud, kuna seljatugi on nurga all.

---

### **③ Kogu tee üles.**

Lükka kaks klambrilt päris üles. Pidurihoova veidi tahapoole nihutamiseks pead võib-olla selle kruvi lahti keerama.

#### ④ kinnitage seljatugi.

Kinnitage mõlemad klambrid 4 mm kuuskantvõtmega kruvide ja mutritega. Seljatoe rihmad peaksid kinnituspunktis olema suunatud ettepoole.

---

#### ⑤ See foto näitab õiget kokkupanekut.

---

#### Enne rullaatori lahtivoltimist.

Rullaatori lahtivoltimiseks kallutage seljatuge ülespoole.

---

#### Vajadusel.

Kui leiata, et seljatugi on liiga lühike/liiga pikk, saate selle pikkust reguleerida. Eemaldage kaks kruvi ja mutrit ning seejärel pange seljatugi uuesti kokku.