



Trionic Walker seljatoe kokkupanekujuhend



Ergonoomiline ja polsterdatud seljatugi, mis on valmistatud vetthülgavast ja vastupidavast 600D polüestrist, sobib Walker 9er, 12er ja 14er rullikutele. See pakub istudes mugavat ja turvalist tuge.

Seljatoe pikkus/sügavus on reguleeritav.

① Keerake lahti.

Eemaldage kruvid ja mutrid kahelt klambrit.

② Kinnitage seljatugi.

Avage klambreid veidi ja kinnitage need käepidemete torude külge. **TÄHTIS:** Veenduge, et „TRIONIC” logo oleks õigesti paigutatud, kuna seljatugi on nurga all.



③ Kogu tee üles.

Lükka kaks klambrit päris üles. Pidurihoova veidi tahapoole nihutamiseks pead võib-olla selle kruvi lahti keerama.





④ kinnitage seljatugi.

Kinnitage mõlemad klambrid 4 mm kuuskantvõtmega kruvide ja mutritega. Seljatoe rihmad peaksid kinnituspunktis olema suunatud ettepoole.

⑤ See foto näitab õiget kokkupanekut.



Enne rullaatori lahtivoltimist.

Rullaatori lahtivoltimiseks kallutage seljatuge ülespoole.

Vajadusel.

Kui leiате, et seljatugi on liiga lühike/liiga pikk, saate selle pikkust reguleerida. Eemaldage kaks kruvi ja mutrit ning seejärel pange seljatugi uuesti kokku.

