




## **Kasutusjuhend: Trionic Walkeri seljatoe rihma vahetamine**



- ① Keerake rihma hoidev kruvi 3 mm kuuskantvõtmeega lahti.  
Korda sama vastasküljel.



- ② Veendu, et saad kruvi, mutter ja torukujulise vahetüki tagasi.

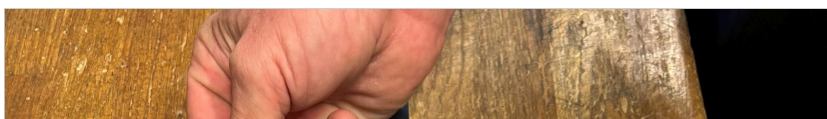



## **Kasutusjuhend: Trionic Walkeri seljatoe rihma vahetamine**



- ⑤ Sisestage uus asendusrihm polstrisse.

**TÄHTIS:** Veenduge, et rihma ots oleks joondatud TRIONICi logoga, nagu fotol näidatud.



- ⑥ Sisestage torukujuline vahetükk rihma otsas olevasse auku.

