



Walker transpordikott – pakkimisjuhised


Walkeri transpordikott koosneb peamisest transpordikotist ja väiksemast hoiu-/kandekotist. Transpordikott sobib kõikidele Walkeri mudelitele.

Sobib kõikidele Trionic Walkeri mudelitele.




① Avage peamine kott

Avage hoiukoti lukk ja pakkige lahti peamine transpordikott.

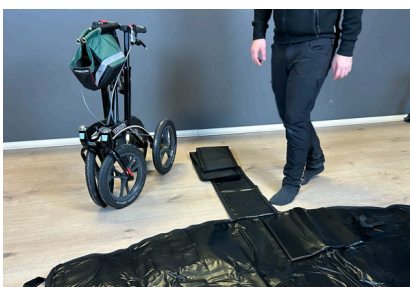


② Levitage põhikotti.

Avage põhikoti tõmblukk täies pikkuses ja voltige koti klapid pörandale.

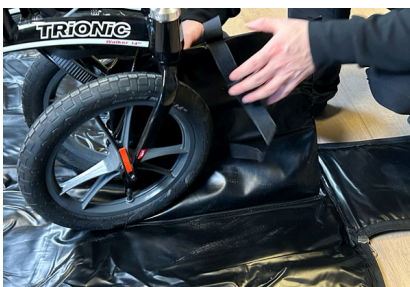

③ Asetage jalutuskäru kotile.

Asetage Walker põhilise transpordikoti keskmisele osale. Põhikotil on integreeritud polsterdatud kaitseklapp takjapaelaga. Tõmmake polsterdatud kaitseklapp ülespoole ja asetage see esiratta kahvli vahele, et kaitsta värvikihti.

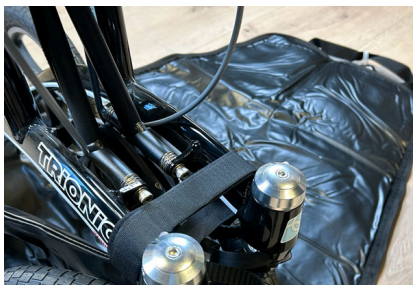

④ Kinnitage volditud raam integreeritud takjapaelaga.



⑤ Voldi keskmine klapp Walkeri kohale.

⑥ Tõstke külgmised klapid üles ja sulgege peamine tõmblukk.

⑦ See foto näitab Walkerit õigesti pakituna.

Pakkimisjuhised

Videojuhiste vaatamiseks skannige QR-koodi oma nutitelefoni või muu seadmega.