



Support de canne Veloped – Instructions de montage

Porte-canne en 2 parties pour le Veloped qui sert également de sangle de sécurité lorsque le Veloped est plié pour le transport ou le rangement. Le porte-canne s'adapte à tous les modèles de Veloped.

Scannez le code QR avec votre smartphone ou votre appareil pour voir les instructions vidéo.





Fixez le support arrière.

Enroulez le support arrière autour de la partie supérieure du tube vertical arrière du cadre, juste en dessous de l'attache rapide de réglage de la hauteur.



Serrez bien la sangle.

Enroulez le support avant autour du tube supérieur du cadre, juste derrière la fixation de la barre de panier. Veillez à ce que la pièce antidérapante soit orientée vers le tube du cadre.



Ajustez la boucle arrière.

La taille de la bande arrière peut être ajustée en desserrant la fermeture en velcro. Vous devrez peut-être presser doucement la boucle pour obtenir une forme arrondie/circulaire.



4 Fixez le support avant.

Enroulez le support avant autour du tube supérieur du cadre, juste derrière la fixation de la barre de panier. Veillez à ce que la pièce antidérapante soit orientée vers le tube du cadre.



5 Ajustez la boucle avant.

La taille de la bande avant peut être ajustée en desserrant la fermeture en velcro. Vous devrez peut-être presser doucement la boucle pour obtenir une forme arrondie/circulaire.



6 Attachez la canne.

Fixez la canne en la poussant par l'arrière, d'abord à travers le support arrière, puis à travers le support avant.



7 Fixez le cadre.

Vous pouvez utiliser la sangle porte-canne pour sécuriser le cadre lorsqu'il est plié, lors du transport ou du rangement de votre Veloped.