

## LED light & holder



Merci d'avoir choisi le feu avant Trionic LED 1000 Lumen.

Ce manuel montre comment fixer le porte-lumière et la lampe sur un Walker (colonne de gauche ci-dessous) et comment les fixer sur un Veloped (colonne de droite ci-dessous).

Sur la photo de gauche, A montre les pièces de fixation du support pour un Walker (2 vis + 2 rondelles). B montre les pièces de fixation du support pour un Veloped (1 vis + 1 écrou moleté + 1 écrou).

## Fixation du porte-lumière


### Instructions pour un Walker



**A1.** Sur le dessus du tube semi-vertical noir, repérez les deux vis qui serrent le tube de la poignée, situé devant le levier de frein.



### Instructions pour un Veloped

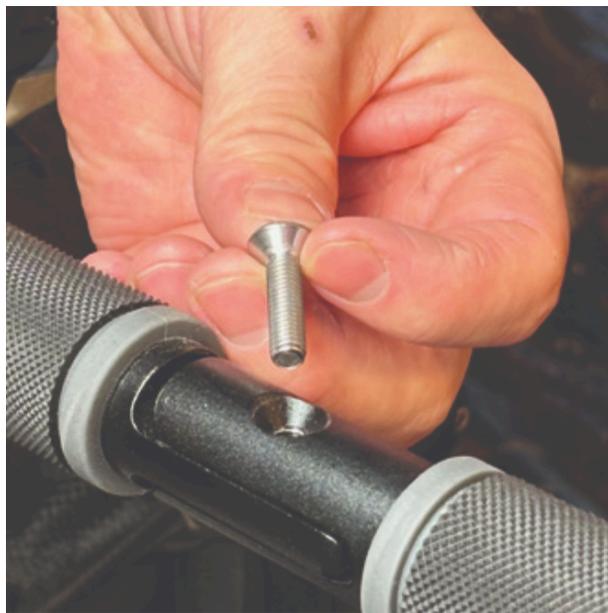


**A1.** Localisez la vis au niveau de la charnière centrale de la barre de préhension en forme de U du Veloped. Dévissez la vis à l'aide de la clé Allen de 4 mm fournie et retirez-la.



# Fixation de la lampe LED au support

## Instructions pour un Walker

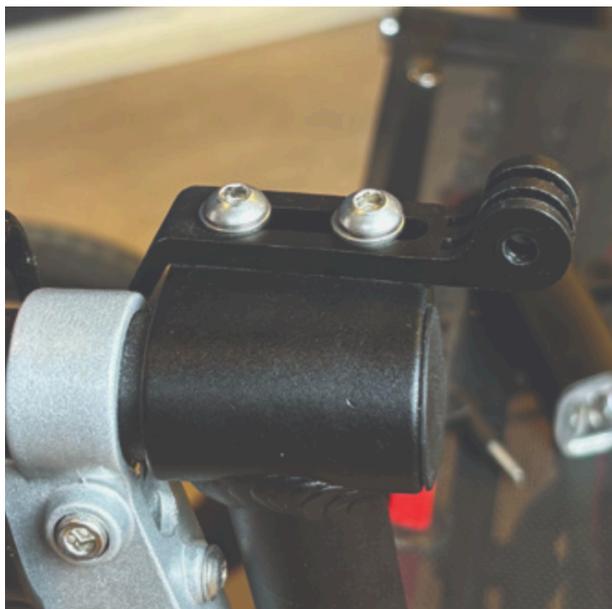


**A6.** Identifiez l'extrémité avant circulaire du porte-lumière, avec deux fentes pour la fixation de la lumière.




**A7.** Poussez le support fendu de la lumière dans les fentes du support et assurez-vous qu'ils sont alignés. Vu dans le sens de marche du Walker, introduisez l'écrou à ailettes fourni par la gauche et serrez-le.

## Instructions pour un Veloped

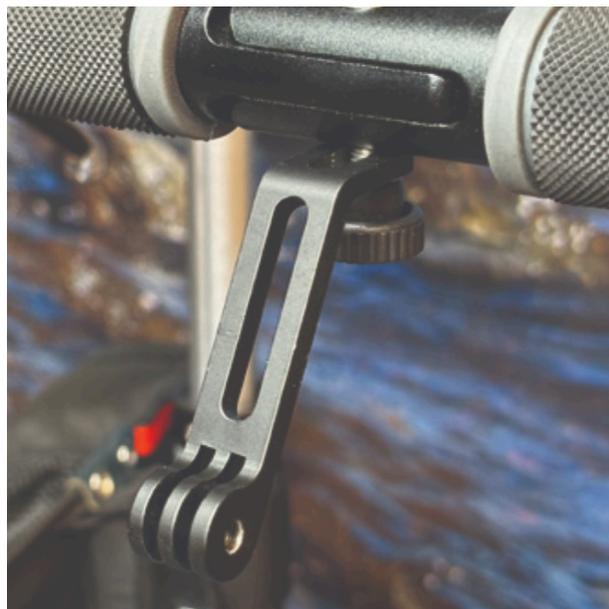

**B6.** Localisez la vis au niveau de la charnière centrale de la barre de préhension en forme de U du Veloped. Dévissez la vis à l'aide de la clé Allen de 4 mm fournie et retirez-la.

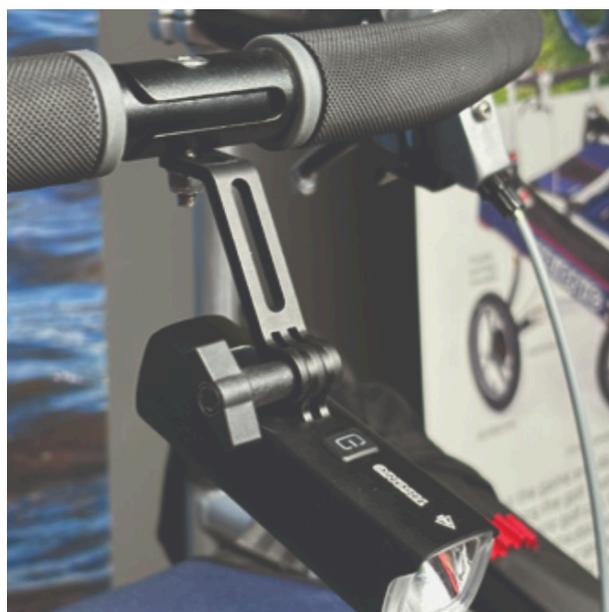

**B7.** Identifiez l'extrémité avant circulaire du porte-lumière, avec deux fentes pour la fixation de la lumière.

## Instructions d'utilisation

### Aperçu