

## Porte-bouteille Veloped - Instructions de montage


Porte-bouteille universel pour Veloped et rollator, se fixant au cadre du Veloped à l'aide d'une pince à vis. Couleur : noir.

La livraison comprend un porte-bouteille, un support de fixation et une clé Allen de 3 mm.


Scannez le code QR avec votre smartphone ou votre appareil pour voir les instructions vidéo.



① Dévissez et retirez une vis du support de fixation.

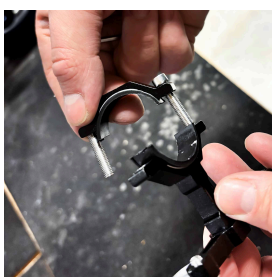

② Dévissez l'autre vis au maximum, mais laissez-la fixée à la pince.

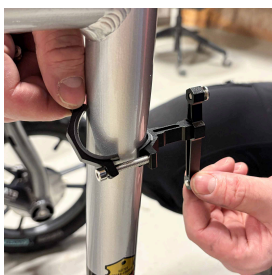

③ Faites pivoter l'une des moitiés de la pince de 90 degrés pour faciliter son montage sur le cadre Veloped. En orientant le bras court du porte-bidon vers le haut, fixez la pince à la partie verticale du tube arrière droit ou gauche du cadre du Veloped. Lors du vissage de la pince sur le cadre du Veloped, veillez à ce que les deux vis soient serrées de manière égale.



④ Desserrez les deux vis du support de fixation, puis vissez le porte-bouteille dessus, de préférence avec l'ouverture latérale du porte-bouteille orientée vers l'extérieur.



⑤ Les porte-bouteilles Veloped sont maintenant correctement installés et prêts à l'emploi. Bravo !