




## **Sac de transport Veloped Guide d'utilisation**


Le sac de transport Veloped comprend un sac principal pour le cadre Veloped et deux sacs plus petits pour les roues avant et arrière. Le sac de transport convient à tous les modèles Veloped.

Convient à tous les modèles Veloped.

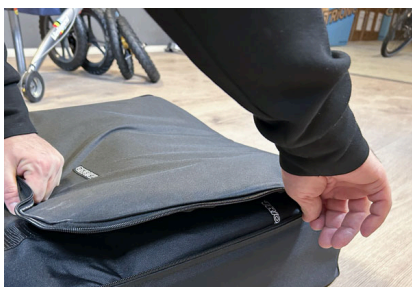

### ① Ouvrir le sac principal.

Dézippez le sac de rangement (qui sert également de sac pour les roues avant) et déballez le sac de transport principal et le sac pour les roues arrière.

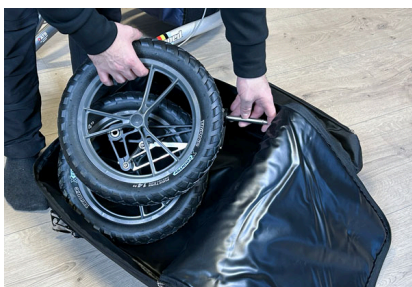


### ② Emballez les roues avant.

Détachez la roue d'escalade avant du cadre Veloped et rangez-la dans le sac à roues le plus grand et fermez la fermeture éclair.




### ③ Emballez les roues arrière.

Détachez les deux roues arrière du cadre Veloped et placez-les dans le plus petit sac à roues et fermez la fermeture éclair.

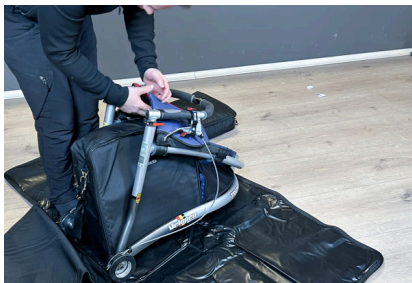

#### ④ étaler le sac principal

Ouvrez la fermeture à glissière du sac principal sur toute sa longueur et déployez le sac sur le sol. Placez le cadre sur la section centrale du sac principal et placez le plus grand sac pour les roues avant sous le siège du Veloped (entre les deux tubes verticaux arrière du cadre).

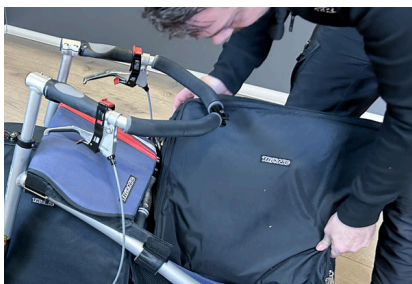

#### ⑤ Ajoutez les sacoches.

Desserrez les leviers de réglage rapide de la hauteur et relevez légèrement la barre de préhension, placez le plus petit sac de roues arrière sur le panier du Veloped, puis abaissez la barre de préhension jusqu'à sa position inférieure.

#### ⑥ Fermer le sac.

Tirez les "rabats" du sac principal sur le panier Veloped et fermez la fermeture éclair.

#### ⑦ Cette photo montre le Veloped correctement emballé.

## **Instructions d'emballage**

*Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent ou votre appareil pour visionner les instructions vidéo.*