



Appui-dos du déambulateur Trionic – Instructions de montage



L'appui-dos ergonomique et rembourré, en polyester 600D imperméable et résistant, s'adapte sur les déambulateurs Walker 9er, 12er et 14er. Il offre un support confortable et sécurisé lorsque vous êtes assis.


La longueur/profondeur du siège est réglable.

① Dévisser.

Retirez les vis et les boulons des deux colliers de serrage.

② Fixez le dossier.

Ouvrez un peu les colliers de serrage et fixez-les aux tubes de poignée. **IMPORTANT:** Assurez-vous que le logo "TRIONIC" est correctement positionné, car l'appui-dos est courbé.

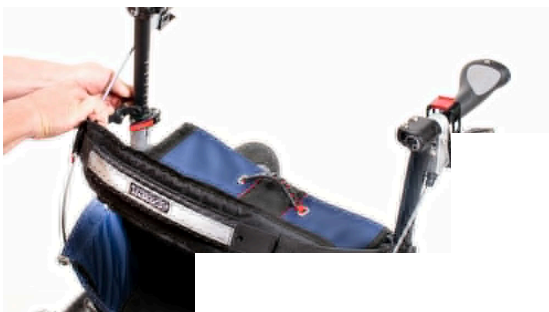

③ Tout en haut.

Poussez les deux colliers vers le sommet. Vous devrez peut-être desserrer la vis du frein du levier afin de le déplacer un peu vers l'arrière.



4) fixer le dossier.

Avec une clé Allen de 4 mm, fixez les deux colliers avec les vis et les boulons. Les sangles de l'appui-dos doivent être orientées vers l'avant au point de fixation.

5) Cette photo montre le montage correct.

Avant de déplier le déambulateur.

Pour replier le déambulateur, inclinez l'appui-dos vers le haut.

Si nécessaire.

Si vous trouvez l'appui-dos trop court/trop long, vous pouvez régler la longueur. Retirez les deux vis et boulons, puis montez de nouveau l'appui-dos.