




Držač za štap Veloped – Upute za sastavljanje

Dvodijelni držač štapa za Veloped koji služi i kao sigurnosni remen kada je Veloped sklopljen radi transporta ili skladištenja. Držač štapa odgovara svim modelima Velopeda.

Skenirajte QR kod svojim pametnim telefonom ili uređajem za pregled video uputa.

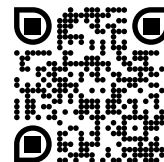

① Pričvrstite stražnji držač.

Omotajte stražnji držač oko gornjeg dijela stražnje okomite cijevi okvira, odmah ispod brzog otpuštanja za podešavanje visine.



② Čvrsto zategnite remen.

Omotajte remen oko cijevi i pričvrstite ga čičkom. Prekomjernu duljinu remena pustite da slobodno visi.



③ Podesite stražnju petlju.

Veličina stražnje petlje može se podesiti otpuštanjem čička. Možda ćete morati lagano stisnuti petlju kako biste dobili zaobljeni/kružni oblik.



④ Pričvrstite prednji držač.

Omotajte prednji držač oko gornje cijevi okvira, odmah iza pričvršćenja za šinu košare. Pazite da je protuklizna zakrpa okrenuta prema cijevi okvira.



⑤ Podesite prednju petlju.

Veličina prednje petlje može se podesiti otpuštanjem čička. Možda ćete morati lagano stisnuti petlju kako biste dobili zaobljeni/kružni oblik.



⑥ Pričvrstite štap za hodanje.

Pričvrstite štap za hodanje tako da ga gurnete straga, prvo kroz stražnji, a zatim kroz prednji držač.



⑦ Osigurajte okvir.

Remen za držač štapa možete koristiti za pričvršćivanje okvira kada je sklopljen, prilikom transporta ili skladištenja vašeg Veloped-a.