



Držač za hodajući štap – upute za sastavljanje

Dvodijelni držač za štap koji je pričvršćen na ručku i okvir hodalice. Gornji dio ima pametnu funkciju brzog zaključavanja, a štap se može brzo pričvrstiti i ukloniti. Odgovara rollatorima Walker 9, 12 i 14.

Skenirajte QR kod svojim pametnim telefonom ili uređajem za pregled video uputa.



- ① Okrenite gornji držač tako da logotip bude okrenut prema gore.



- ② Pričvrstite držač na gornji dio cijevi rukohvata.

Pričvrstite držač na gornji dio cijevi rukohvata, a zatim ga pričvrstite vijcima križnim odvijačem.



- ③ Ako pričvrstite i držač štapa i naslon

Napomena: Podesite položaj ručice kočnice tako da ima mjesta za gornji držač štapa pored naslona. Možda će biti potrebno nagnuti držač štapa prema van, otprilike 30 stupnjeva, kako bi držač štapa i naslon odgovarali hodalice.




④ Pričvrstite donji držač na okvir

Za montažu s desne/lijeve strane, okrenite donji držač tako da možete dosegnuti vijak s vanjske strane okvira. Za pričvršćivanje donjeg držača na okvir, omotajte remen oko cijevi okvira i gurnite ga u otvor držača.



⑤ Zategnite vijak/remen

Zategnite vijak/remen pomoću imbus ključa od 4 mm.

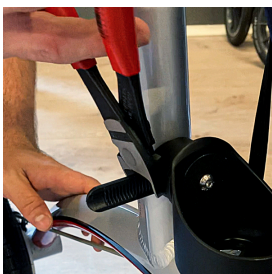

⑥ Odrežite prekomjernu duljinu remena

Prekomjernu duljinu remena odrežite rezačem kabela.



⑦ Spremno za upotrebu