



## ***Trionic hodajući naslon – upute za sastavljanje***

Ergonomski i podstavljeni naslon, izrađen od vodoodbojnog i izdržljivog 600D poliestera, odgovara kolicima Walker 9, 12 i 14 godina. Pruža udobnu i sigurnu potporu dok sjedite.

Duljina/dubina naslona je podesiva.

### **① Odvrnuti.**

Uklonite vijke i matice s dvije stezaljke.

---

### **② Pričvrstite naslon za leđa.**

Malo otvorite stezaljke i pričvrstite ih na cijevi za hvatanje. **VAŽNO**; Provjerite je li logotip „TRiONiC“ ispravno postavljen jer je naslon pod kutom.

---

### **③ Sve do vrha.**

Gurnite dvije stezaljke do samog vrha. Možda ćete morati otpustiti vijak na ručici kočnice kako biste je malo pomaknuli unatrag.

**4** pričvrstite naslon.

Imbus ključem od 4 mm pričvrstite obje stezaljke vijcima i maticama. Remeni naslona trebaju biti usmjereni prema naprijed na mjestu pričvršćivanja.

---

**5** Ova fotografija prikazuje ispravnu montažu.

---

**Prije rasklapanja rolatora.**

Za rasklapanje rolatora, nagnite naslon prema gore.

---

**Ako je potrebno.**

Ako vam je naslon prekratak/predug, možete podesiti duljinu. Odvijte dva vijka i matice, a zatim ponovno sastavite naslon.