



Trionic hodajući naslon – upute za sastavljanje



Ergonomski i podstavljeni naslon, izrađen od vodoodbojnog i izdržljivog 600D poliestera, odgovara kolicima Walker 9, 12 i 14 godina. Pruža udobnu i sigurnu potporu dok sjedite.

Duljina/dubina naslona je podesiva.

① Odvrnuti.

Uklonite vijke i matice s dvije stezaljke.

② Pričvrstite naslon za leđa.

Malo otvorite stezaljke i pričvrstite ih na cijevi za hvatanje. **VAŽNO:** Provjerite je li logotip „TRIONIC“ ispravno postavljen jer je naslon pod kutom.



③ Sve do vrha.

Gurnite dvije stezaljke do samog vrha. Možda ćete morati otpustiti vijak na ručici kočnice kako biste je malo pomaknuli unatrag.





④ pričvrstite naslon.

Imbus ključem od 4 mm pričvrstite obje stezaljke vijcima i maticama. Remeni naslona trebaju biti usmjereni prema naprijed na mjestu pričvršćivanja.

⑤ Ova fotografija prikazuje ispravnu montažu.



Prije rasklapanja rotatora.

Za rasklapanje rotatora, nagnite naslon prema gore.

Ako je potrebno.

Ako vam je naslon prekratak/predug, možete podesiti duljinu. Odvijte dva vijka i matice, a zatim ponovno sastavite naslon.

