



Transportna torba za hodalicu – Upute za pakiranje


Walker transportna torba sastoji se od glavne transportne torbe i manje torbe za pohranu/nošenje. Transportna torba odgovara svim Walker modelima.

Odgovara svim modelima Trionic Walkera.




① Otvorite glavnu vrećicu

Otvorite patentni zatvarač vrećice za pohranu i raspakirajte glavnu transportnu torbu.

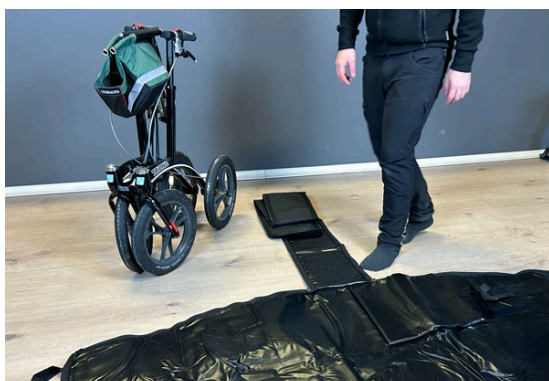


② Raširite glavnu vrećicu.

Otkopčajte patentni zatvarač glavne torbe do kraja i rasklopite preklope torbe na podu.

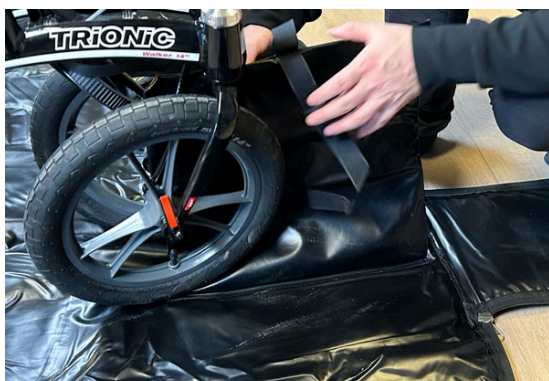


③ Stavite hodalicu na torbu.


Postavite hodalicu na središnji dio glavne transportne torbe. Glavna torba ima integrirani podstavljeni zaštitni preklop s čičak trakom. Povucite podstavljeni zaštitni preklop prema gore i postavite ga između vilica prednjih kotača kako biste zaštitili lak.

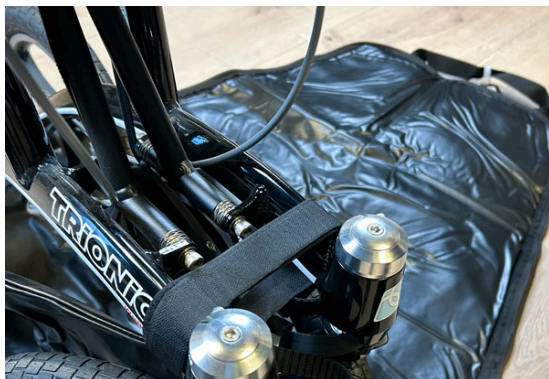


④ Sklopljeni okvir pričvrstite integriranom čičak trakom.

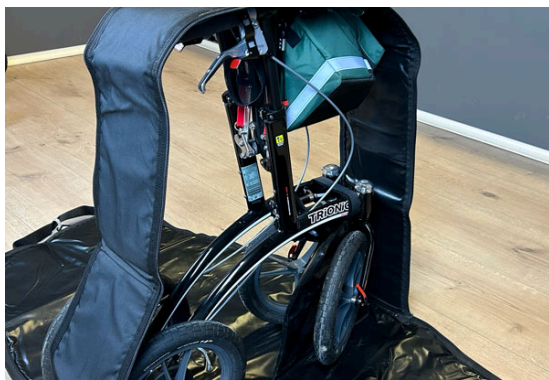

⑤ Preklopite središnji preklop preko hodalice.

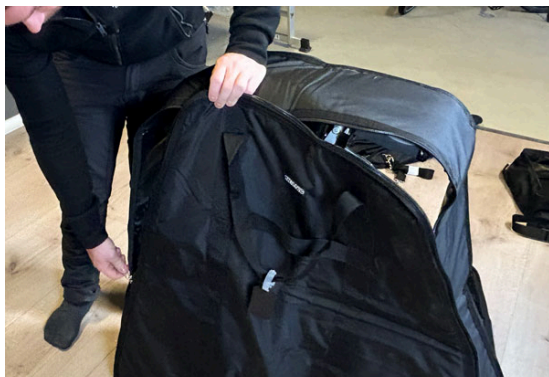

⑥ Podignite bočne preklope i zatvorite glavni patentni zatvarač.

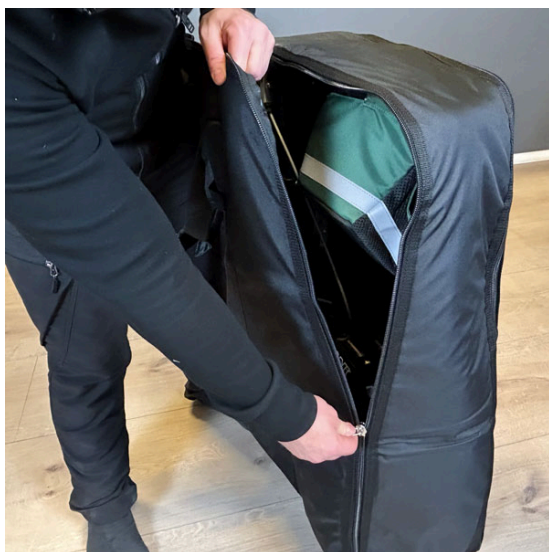

⑦ Ova fotografija prikazuje Walker ispravno zapakiran.

Upute za pakiranje



Skenirajte QR kod svojim pametnim telefonom ili uređajem za pregled video uputa.