



## **Transportna torba za hodalicu – Upute za pakiranje**


Walker transportna torba sastoji se od glavne transportne torbe i manje torbe za pohranu/nošenje. Transportna torba odgovara svim Walker modelima.

Odgovara svim modelima Trionic Walkera.




### ① Otvorite glavnu vrećicu

Otvorite patentni zatvarač vrećice za pohranu i raspakirajte glavnu transportnu torbu.

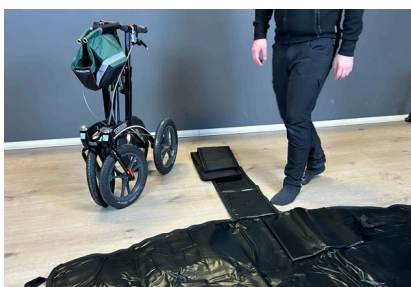


### ② Raširite glavnu vrećicu.

Otkopčajte patentni zatvarač glavne torbe do kraja i rasklopote preklape torbe na podu.

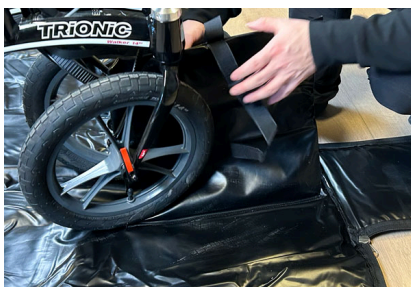

### ③ Stavite hodalicu na torbu.

Postavite hodalicu na središnji dio glavne transportne torbe. Glavna torba ima integrirani podstavljeni zaštitni preklap s čičak trakom. Povucite podstavljeni zaštitni preklap prema gore i postavite ga između vilica prednjih kotača kako biste zaštitili lak.

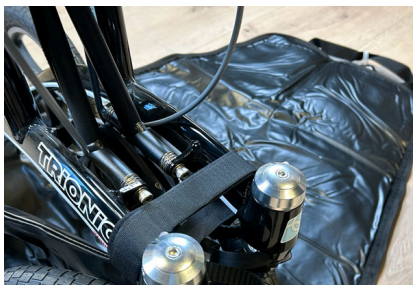

④ Sklopljeni okvir pričvrstite integriranom čičak trakom.



⑤ Preklopите središnji preklop preko hodalice.

⑥ Podignite bočne preklope i zatvorite glavni patentni zatvarač.

⑦ Ova fotografija prikazuje Walker ispravno zapakiran.

## **Upute za pakiranje**

*Skenirajte QR kod svojim pametnim telefonom ili uređajem za pregled video uputa.*