



Használati útmutató: Trionic kábelzár



① Keresse meg a csavart a tartókonzolon.



② Csavarja ki a csavart egy 4 mm-es imbuszkulccsal.



③ Húzza ki a szíj végét a tartóból.



④ Tekerd a hevedert a Veloped hátsó függőleges vázcsövére (a Walker esetében a félig függőleges vázcsőre).




⑤ Helyezze be a szíj végét a tartóba.



⑥ Húzza meg a csavart/szíjat a 4 mm-es imbuszkulccsal, amíg a szíj feszes nem lesz.



⑦ Vágja le a heveder túlzott hosszát kábelvágóval vagy késsel.

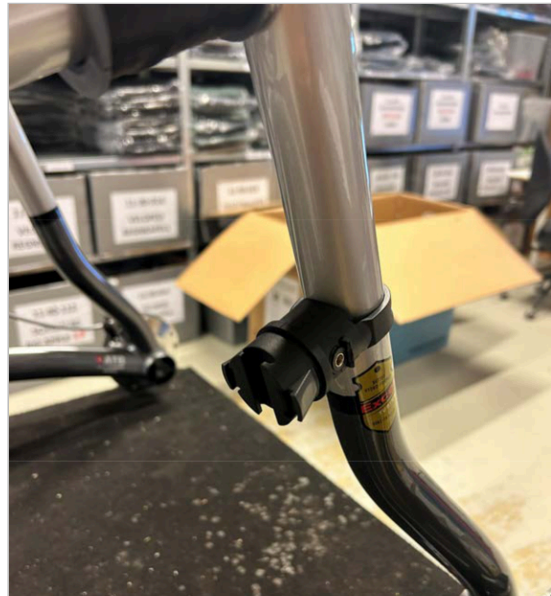

⑧ A képen a tartó helyes rögzítése látható.



⑨ Felülről rögzítse a kábelzárat a konzolhoz, majd nyomja lefelé, amíg a konzolba nem kattann.



⑩ A kábelzár konzolról való leválasztásához nyomja meg a két szürke gombot, és vegye ki a zárat a konzolból.