




## Járóbottartó – összeszerelési útmutató

Kétrészes bottartó, amely a Walker fogantyújához és vázához rögzíthető. A felső rész intelligens gyorsár funkcióval rendelkezik, így a bot gyorsan fel- és levehető. A 9, 12 és 14 méretű Walker rollátorokhoz illik.

Olvasd be a QR-kódot okostelefonoddal vagy más mobil eszközöddel a videós útmutató megtekintéséhez.

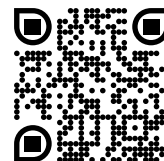

① Fordítsa el a felső tartót úgy, hogy a logó felfelé nézzen.



② Pattintsa a tartót a markolatcső felső részére.

Pattintsa a tartót a markolatcső felső részére, majd csavarja a helyére egy csillagcsavarhúzóval.



③ Ha a bottartót és a háttámlát is rögzíti

**Megjegyzés:** Állítsa be a fékkar helyzetét úgy, hogy legyen hely a felső bottartónak a háttámla mellett. Szükséges lehet a bottartót kifelé dönteni, körülbelül 30 fokkal, hogy a bottartó és a háttámla illeszkedjen a Walkerre.




#### ④ Rögzítse az alsó tartót a kerethez

Jobb/bal oldali összeszereléshez fordítsa el az alsó tartót úgy, hogy a keret kívülről elérje a csavart. Az alsó tartó kerethez rögzítéséhez tekerje a hevedert a keretcső köré, és nyomja a tartó furatába.



#### ⑤ Húzza meg a csavart/pántot

Húzza meg a csavart/pántot egy 4 mm-es imbuszkulccsal.

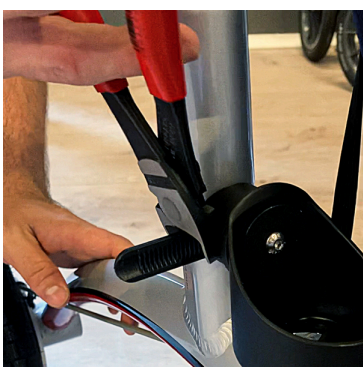

#### ⑥ Vágja le a szíj túlzott hosszát

Vágja le a szíj felesleges hosszát egy kábelvágóval.



#### ⑦ Használatra kész