



## Járóbottartó – összeszerelési útmutató

Kétrészes bottartó, amely a Walker fogantyújához és vázához rögzíthető. A felső rész intelligens gyorszár funkcióval rendelkezik, így a bot gyorsan fel- és levehető. A 9, 12 és 14 méretű Walker rollátorokhoz illik.

Olvasd be a QR-kódot okostelefonoddal vagy más mobil eszközöddel a videós útmutató megtekintéséhez.



- ① Fordítsa el a felső tartót úgy, hogy a logó felfelé nézzen.



- ② Pattintsa a tartót a markolatcső felső részére.

Pattintsa a tartót a markolatcső felső részére, majd csavarja a helyére egy csillagcsavarhúzóval.



- ③ Ha a bottartót és a háttámlát is rögzíti

**Megjegyzés:** Állítsa be a fékkar helyzetét úgy, hogy legyen hely a felső bottartónak a háttámla mellett. Szükséges lehet a bottartót kifelé dönteni, körülbelül 30 fokkal, hogy a bottartó és a háttámla illeszkedjen a Walkerre.



④ Rögztse az alsó tartót a kerethez

Jobb/bal oldali összeszereléshez fordítsa el az alsó tartót úgy, hogy a keret kívülről elérje a csavart. Az alsó tartó kerethez rögzítéséhez tekerje a hevedert a keretcső köré, és nyomja a tartó furatába.



⑤ Húzza meg a csavart/pántot

Húzza meg a csavart/pántot egy 4 mm-es imbuszkulccsal.



⑥ Vágja le a szíj túlzott hosszát

Vágja le a szíj felesleges hosszát egy kábelvágóval.



⑦ Használatra kész