



Trionic járókeret háttámla – Összeszerelési útmutató

Az ergonomikus és párnázott háttámla vízlepergető és tartós 600D poliészterből készült, és illeszkedik a Walker 9-es, T2-es és 14-es rollátorokhoz. Kényelmes és biztonságos támaszt nyújt ülés közben.

A háttámla hossza/mélysége állítható.

① Csavarja le.

Távolítsa el a csavarokat és anyákat a két bilincsről.

② Rögzítse a háttámlát.

Nyissa ki kissé a bilincseket, és rögzítse azokat a markolatcsövekhez. **FONTOS:** Győződjön meg arról, hogy a „TRIONIC” logó megfelelően van elhelyezve, mivel a háttámla szögben áll.

③ Egészen felfelé.

Nyomd a két bilincset egészen a tetejére. Lehet, hogy meg kell lazítanod a fékkar csavarját, hogy kicsit hátrafelé mozdíthasd.

④ rögzítse a háttámlát.

Egy 4 mm-es imbuszkulccsal rögzítse mindkét bilincset csavarokkal és anyákkal. A háttámla hevedereinek a rögzítési pontnál előre kell mutatniuk.

⑤ Ez a fotó a helyes összeszerelést mutatja.

A rollátor kihajtása előtt.

A rollátor kihajtásához döntse felfelé a háttámlát.

Ha szükséges.

Ha a háttámlát túl rövidnek/túl hosszúnak találja, beállíthatja a hosszát. Távolítsa el a két csavart és anyát, majd szerelje vissza a háttámlát.