



## **Használati útmutató: Trionic Walker háttámla heveder cseréje**




- ① Csavarja ki a szíjat rögzítő csavart egy 3 mm-es imbuszkulccsal.

Ismételd meg az ellenkező oldalon.




- ② Győződjön meg róla, hogy visszaszerezte a csavart, az anyát és a cső alakú távtartót.

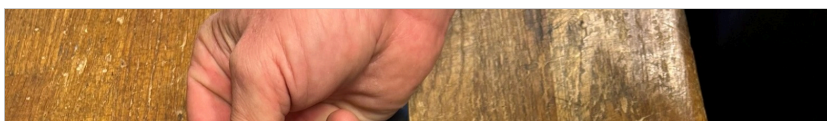



## **Használati útmutató: Trionic Walker háttámla heveder cseréje**

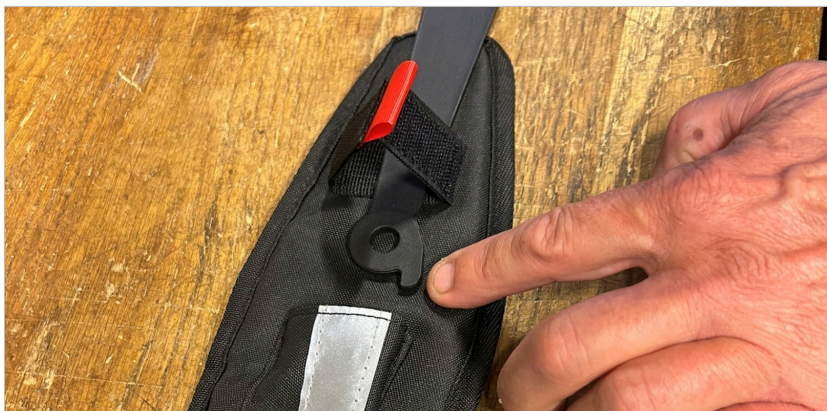

- ⑤ Helyezze be az új cserepántot a párnába.

**FONTOS:** Ügyeljen arra, hogy a szíj vége a TRIONIC logóhoz igazodjon, ahogy a képen látható.



- ⑥ Helyezze be a cső alakú távtartót a szíj végén található lyukba.

