



„Veloped“ butelių laikiklis – surinkimo instrukcijos


„Veloped“ butelio laikiklis, tvirtinamas prie „Veloped“ rėmo prisukamu spaustuku. Spalva: juoda.

Į komplektą įeina butelio laikiklis, spaustuko laikiklis ir 3 mm šešiakampis raktas.


Nuskaitykite QR kodą išmaniuoju telefonu arba įrenginiu, kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašo instrukcijas.



① Atsukite ir išimkite vieną varžtą iš spaustuko laikiklio.

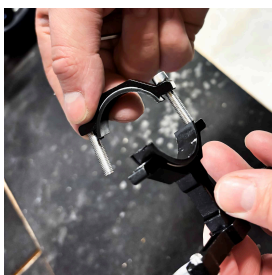

② Atsukite kitą varžtą kiek įmanoma giliau, bet palikite jį pritvirtintą prie spaustuko.

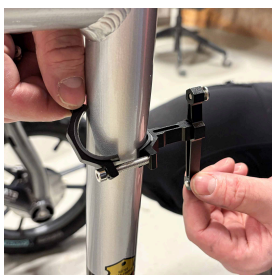

③ Pasukite vieną spaustuko pusę 90 laipsnių kampu, kad būtų lengviau pritvirtinti spaustuką prie „Veloped“ rėmo. Trumpąją butelio laikiklio rankenėlę nukreipę į viršų, pritvirtinkite spaustuką prie vertikalios „Veloped“ dešiniojo arba kairiojo galinio rėmo vamzdžio dalies. Prisukdami spaustuką prie „Veloped“ rėmo, įsitikinkite, kad abu varžtai yra vienodai priveržti.



- ④ Atlaisvinkite du varžtus ant spaustuko laikiklio ir tada prisukite ant jo butelio laikiklį, geriausia taip, kad butelio laikiklio šoninė anga būtų nukreipta į išorę.



- ⑤ „Veloped“ butelių laikiklis dabar teisingai pritvirtintas ir paruoštas naudoti.