




Vaikštynės lazdelės laikiklio surinkimo instrukcijos

Dviejų dalių lazdelės laikiklis, tvirtinamas prie Walker vaikštynės rankenos ir rėmo. Viršutinė dalis turi išmaniąją greito fiksavimo funkciją, todėl lazdelę galima greitai pritvirtinti ir nuimti. Tinka Walker vaikštynėms 9, 12 ir 14 colių.

Nuskaitykite QR kodą išmaniuoju telefonu arba įrenginiu, kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašo instrukcijas.

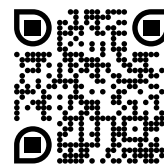

① Viršutinį laikiklį pasukite taip, kad logotipas būtų nukreiptas į viršų.



② Užfiksuokite laikiklį ant viršutinės rankenos vamzdžio dalies. Užfiksuokite laikiklį ant viršutinės rankenos vamzdžio dalies ir prisukite jį „Phillips“ atsuktuvu.



③ Jei pritvirtinsite ir lazdelės laikiklį, ir atlošą

Pastaba: Sureguliuokite stabdžių svirties padėtį taip, kad šalia atlošo būtų vietos viršutiniam lazdos laikikliui. Gali tekti pakreipti lazdos laikiklį į išorę, maždaug 30 laipsnių kampu, kad jis tilptų į vaikštynės atlošą.




④ Pritvirtinkite apatinį laikiklį prie rėmo

Montuojant dešinėje/kairėje pusėje, pasukite apatinį laikiklį taip, kad galėtumėte pasiekti varžtą iš rėmo išorės. Norėdami pritvirtinti apatinį laikiklį prie rėmo, apvyniokite dirželį aplink rėmo vamzdį ir įstumkite jį į laikiklio angą.



⑤ Priveržkite varžtą/dirželį

Priveržkite varžtą/dirželį 4 mm šešiakampiu raktu.

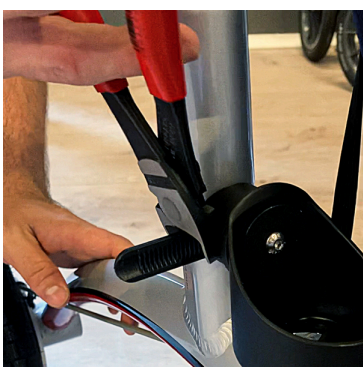

⑥ Nupjaukite per didelį dirželio ilgį

Nupjaukite perteklinį dirželio ilgį kabelių žirkklėmis.



⑦ Paruošta naudoti