



Instrukcija: Butelio laikiklio surinkimas ant „Walker 12er“ S dydžio.



① Butelio laikiklio surinkimo vieta (D arba L).



② Apvyniokite dirželį aplink rėmo vamzdį ir ištraukite jį per laikiklį.



③ Tvirtai užtraukite dirželį ir pasukite veržlę pagal laikrodžio rodyklę, kad jį įtemptumėte.



④ Nupjaukite perteklinį dirželį.



⑤ Antrąjį laikiklį pritvirtinkite tokiu pačiu būdu.



⑥ Du laikikliai teisingai surinkti ant rėmo vamzdžio.



⑦ Pritvirtinkite butelio laikiklį dviem varžtais. Butelio laikiklio „anga“ turi būti nukreipta į išorę.



⑧ Butelio laikiklis dabar pritvirtintas prie rėmo, į butelį įkišate iš šono ir ištraukiate jį išorę.