



## Trionic Walker atlošas – surinkimo instrukcijos



Ergonomiškas ir paminkštintas atlošas, pagamintas iš vandeniui atsparaus ir patvaraus 600D poliesterio, tinka „Walker“ 9, 12 ir 14 colių ratukams. Jis suteikia patogią ir saugią atramą sėdint.

Atlošo ilgis/gylis reguliuojamas.

### ① Atsukite.

Nuimkite varžtus ir varžles nuo dviejų spaustukų.

### ② Pritvirtinkite atlošą.

Šiek tiek atidarykite spaustukus ir pritvirtinkite juos prie rankenų vamzdžių. **SVARBU:** Įsitinkite, kad „TRIONIC“ logotipas yra tinkamai padėtas, nes atlošas yra pakreiptas.



### ③ Visą kelią aukštyn.

Stumkite du spaustukus į patį viršų. Gali tekti atlaisvinti stabdžių svirties varžtą, kad ją šiek tiek pastumtumėte atgal.





④ pritvirtinkite atlošą.

4 mm šešiakampiu raktu pritvirtinkite abu spaustukus varžtais ir veržlėmis. Atlošo dirželiai tvirtinimo taške turi būti nukreipti į priekį.

⑤ Šioje nuotraukoje parodytas teisingas surinkimas.



Prieš išskleidžiant riedulį.

Norėdami išskleisti riedulį, pakreipkite atlošą į viršų.

**Jei reikia.**

Jei atlošas per trumpas/per ilgas, galite reguliuoti jo ilgį. Nuimkite du varžtus ir veržles, tada vėl surinkite atlošą.

