



„Walker“ transportavimo krepšys – pakavimo instrukcijos


„Walker“ transportavimo krepšį sudaro pagrindinis transportavimo krepšys ir mažesnis laikymo / nešiojimo krepšys. Transportavimo krepšys tinka visiems „Walker“ modeliams.

Tinka visiems „Trionic Walker“ modeliams.



① Atidarykite pagrindinį krepšį

Atsekite laikymo krepšio užtrauktuką ir išpakuokite pagrindinį transportavimo krepšį.

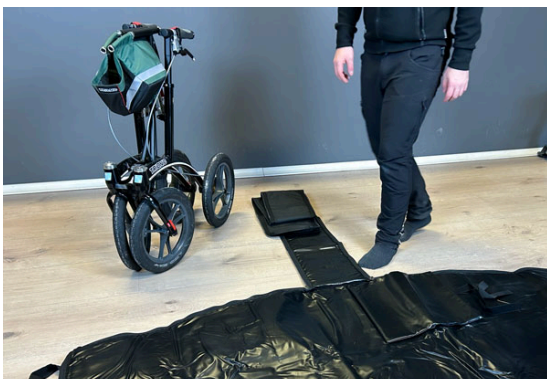

② Išskeiskite pagrindinį maišelį.

Atsekite pagrindinio krepšio užtrauktuką per visą ilgį ir išskeiskite krepšio atvartus ant grindų.



③ Padėkite vaikštynę ant krepšio.

Padėkite „Walker“ vežimėlį ant pagrindinio transportavimo krepšio vidurinės dalies. Pagrindinis krepšys turi integruotą paminkštintą apsauginį atvartą su „Velcro“ dirželiu. Patraukite paminkštintą apsauginį atvartą į viršų ir įkiškite jį tarp priekinių ratų šakių, kad apsaugotumėte dažus.



④ Pritvirtinkite sulankstytą rėmą integruotu „Velcro“ dirželiu.



⑤ Užlenkite centrinį atvartą ant Walker.



⑥ Pakelkite šoninius atvartus ir užtraukite pagrindinį užtrauktuką.



⑦ Šioje nuotraukoje Walker pavaizduotas teisingai supakuotas.

Pakavimo instrukcijos



Nuskaitykite QR kodą išmaniuoju telefonu arba įrenginiu, kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašo instrukcijas.