



## „Walker“ transportavimo krepšys – pakavimo instrukcijos


„Walker“ transportavimo krepšį sudaro pagrindinis transportavimo krepšys ir mažesnis laikymo / nešiojimo krepšys. Transportavimo krepšys tinka visiems „Walker“ modeliams.

Tinka visiems „Trionic Walker“ modeliams.




### ① Atidarykite pagrindinį krepšį

Atsekite laikymo krepšio užtrauktuką ir išpakuokite pagrindinį transportavimo krepšį.

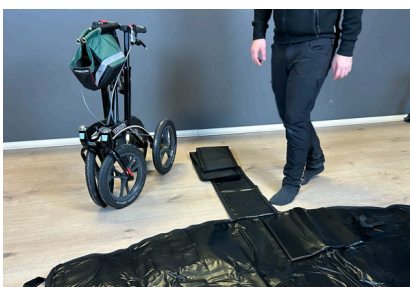


### ② Išskleiskite pagrindinį maišelį.

Atsekite pagrindinio krepšio užtrauktuką per visą ilgį ir išskleiskite krepšio atvartus ant grindų.

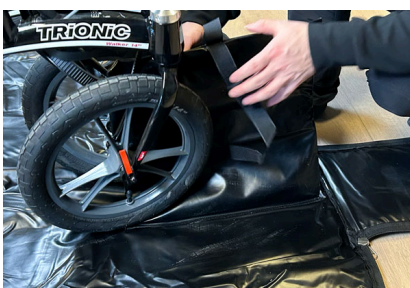

### ③ Padėkite vaikštynę ant krepšio.

Padėkite „Walker“ vežimėlį ant pagrindinio transportavimo krepšio vidurinės dalies. Pagrindinis krepšys turi integruotą paminkštintą apsauginį atvartą su „Velcro“ dirželiu. Patraukite paminkštintą apsauginį atvartą į viršų ir įkiškite jį tarp priekinių ratų šakių, kad apsaugotumėte dažus.

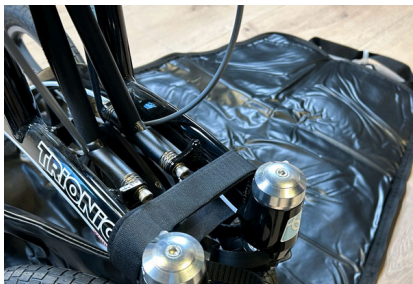

④ Pritvirtinkite sulankstytą rėmą integruotu „Velcro“ dirželiu.



⑤ Užlenkite centrinį atvartą ant Walker.

⑥ Pakelkite šoninius atvartus ir užtraukite pagrindinį užtrauktuką.

⑦ Šioje nuotraukoje Walker pavaizduotas teisingai supakuotas.

## **Pakavimo instrukcijos**

*Nuskaitykite QR kodą  
išmaniuoju telefonu arba  
įrenginiu, kad peržiūrėtumėte  
vaizdo įrašo instrukcijas.*