




Ātrās atbrīvošanas ass garuma regulēšana

Ir svarīgi pārliedzināties, ka tas ir pareizi noregulēts!

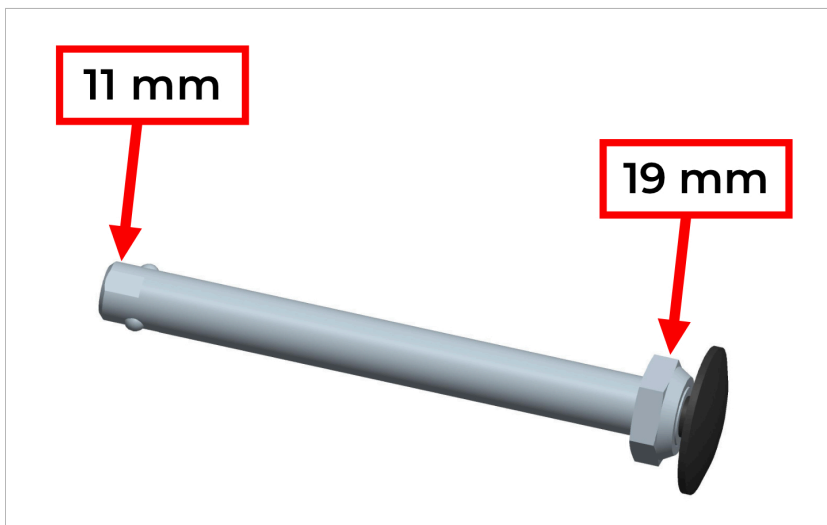

1. Ātrās atbrīvošanas ass iekšējā galā ir divas plakanas virsmas.
2. Uzlieciet 11 mm uzgriežņu atslēgu uz iekšējā ass gala, lai novērstu ass griešanos.
3. Izņemot 19 mm uzgriežņu atslēgu, var noregulēt lielo uzgriezni ass ārējā galā.
4. Lai palielinātu ass garumu: atskrūvējiet uzgriezni pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
5. Lai samazinātu ass garumu: skrūvējiet pulksteņrādītāja virzienā.
6. Noregulējiet uzgriezni par ½ apgriezienu vienlaikus un pēc tam pārbaudiet montāžu.
7. Pārliedzināties, vai ass ir pareizi nofiksējusies vietā (melnā spiedpoga ir izstumta) un vai starp riteni un rāmi nav sānu brīvkustības.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, zvaniet mūsu klientu atbalsta dienestam: +46-8-522 100 50