




Veloped transporta somas lietotāja rokasgrāmata

Veloped transportēšanas soma ietver galveno somu Veloped rāmim un divas mazākas somas priekšējā un aizmugurējā riteņiem. Transportēšanas soma ir piemērota visiem Veloped modeļiem.


Der visiem Veloped modeļiem.

① Atveriet galveno somu.

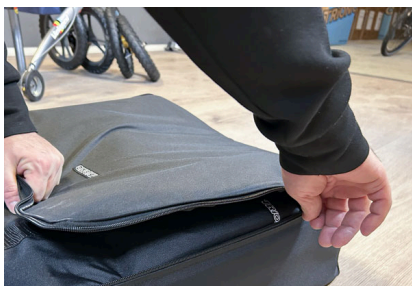

Atver uzglabāšanas somas rāvējslēdzēju (kas kalpo arī kā priekšējā riteņa soma) un izpako galveno transportēšanas somu un aizmugurējā riteņa somu.

② Sakravājiet priekšējos riteņus.

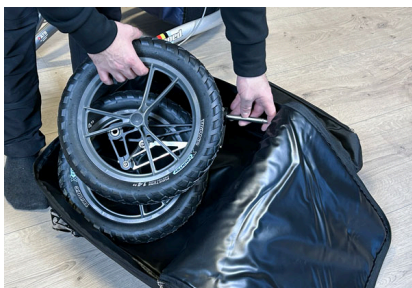


Atvienojiet priekšējo kāpšanas riteņi no Veloped rāmja, ievietojiet to lielākajā riteņu somā un aizveriet rāvējslēdzēju.

③ Sablīvējiet aizmugurējos riteņus.




Atvienojiet abus aizmugurējos riteņus no Veloped rāmja, ievietojiet tos mazākajā riteņu somā un aizveriet rāvējslēdzēju.

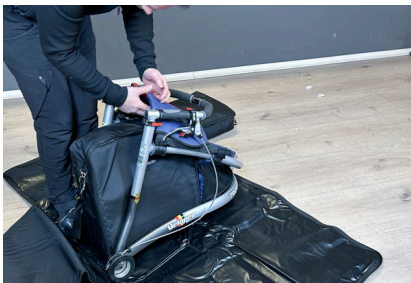

④ Izklājiet galveno maisu

Atver galvenās somas rāvējslēdzēju visā garumā un atloci somu uz grīdas. Novietojiet rāmi uz galvenās somas centrālās daļas un novietojiet lielāko priekšējā riteņa somu zem Veloped sēdekļa (starp divām aizmugurējām vertikālajām rāmja caurulēm).

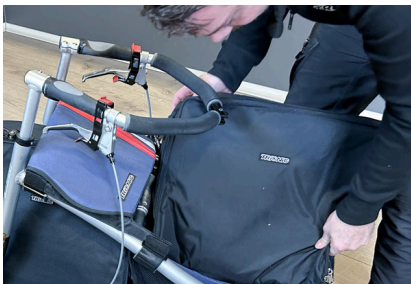

⑤ Pievienojiet riteņu somas.

Atbrīvojiet augstuma regulēšanas ātrās atbrīvošanas sviras un nedaudz paceliet roktura stieni, novietojiet mazāko aizmugurējo riteņu somu Veloped groza augšpusē un pēc tam nolaidiet roktura stieni apakšējā pozīcijā.

⑥ Aizveriet maisiņu.

Pārvelciet galvenās somas "atlokus" pāri Veloped un aizveriet rāvējslēdzēju.

⑦ Šajā fotoattēlā Veloped ir pareizi iepakots.

Iepakošanas instrukcijas

Noskenējiet QR kodu ar savu viedtālruni vai citu ierīci, lai skatītu video instrukcijas.