



Staigulīša spieķa turētājs – montāžas instrukcija

Dīvalģis spieķa turētājs, kas piestiprināts pie roktura un Walker ratiņa rāmjā. Augšējai daļai ir vieda ātrās fiksācijas funkcija, un spieķi var ātri piestiprināt un noņemt. Piemērots Walker 9er, 12er un 14er rollatoriem.

Noskenējiet QR kodu ar savu viedtālruni vai citu ierīci, lai skatītu video instrukcijas.



- ① Pagrieziet augšējo turētāju tā, lai logotips būtu vērstš uz augšu.



- ② Piestipriniet turētāju pie roktura caurules augšējās daļas.

Uzspiediet turētāju uz roktura caurules augšējās daļas un pēc tam pieskrūvējiet to vietā ar krustveida skrūvgriezi.



- ③ Ja piestiprināšiet gan spieķa turētāju, gan atzveltni

Piezīme: Noregulējiet bremžu sviras pozīciju tā, lai blakus atzveltnē būtu vieta augšējam spieķa turētājam. Var būt nepieciešams noliekt spieķa turētāju uz āru aptuveni par 30 grādiem, lai spieķa turētājs un atzveltnē atbilstu Walker ratiņiem.




④ Piestipriniet apakšējo turētāju pie rāmja

Lai montētu labajā/kreisajā pusē, pagrieziet apakšējo turētāju tā, lai varētu aizsniegt skrūvi no rāmja ārpuses. Lai piestiprinātu apakšējo turētāju pie rāmja, aptiniet siksnu ap rāmja cauruli un iespiediet to turētāja caurumā.



⑤ Pievelciet skrūvi/siksnu

Pievelciet skrūvi/siksnu, izmantojot 4 mm sešstūra atslēgu.

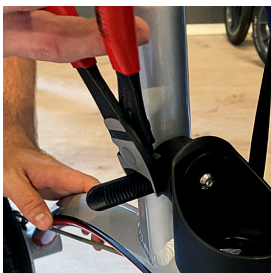

⑥ Nogrieziet siksnas pārmērīgo garumu

Nogrieziet siksnas pārmērīgo garumu ar kabeļu šķērēm.



⑦ Gatavs lietošanai