



## Trionic Walker atzveltne – montāžas instrukcija



Ergonomiskā un polsterētā atzveltne, kas izgatavota no ūdeni atgrūdoša un izturīga 600D poliestera, ir piemērota Walker 9er, 12er un 14er rollatoriem. Tā nodrošina ērtu un drošu atbalstu sēdus stāvoklī.

Atzveltnes garums/dzījums ir regulējams.

### ① Atskrūvēt.

Noņemiet skrūves un uzgriežņus no abām skavām.

### ② Piestipriniet atzveltni.

Nedaudz atveriet skavas un piestipriniet tās pie roktura caurulēm. **SVARĪGI:** Pārlicinieties, vai logotips "TRIONIC" ir pareizi novietots, jo atzveltne ir leņķī.



### ③ Visā augšup.

Spiediet abas skavas līdz pašai augšai. Lai nedaudz pārvietotu bremžu sviru atpakaļ, iespējams, būs jāatbrīvo skrūve uz tās.





**④** piestipriniet atzveltni.

Ar 4 mm sešstūra atslēgu piestipriniet abas skavas ar skrūvēm un uzgriežņiem. Atzveltnes siksniņām stiprinājuma punktā jābūt vērstām uz priekšu.

---

**⑤** Šajā fotoattēlā redzama pareiza montāža.

---

**Pirms rollatora atlocīšanas.**

Lai atlocītos rollatoru, nolieciet atzveltni uz augšu.

---

**Ja nepieciešams.**

Ja atzveltne ir pārāk īsa/pārāk gara, varat noregulēt tās garumu. Noņemiet abas skrūves un uzgriežņus un pēc tam salieciet atzveltni atpakaļ.